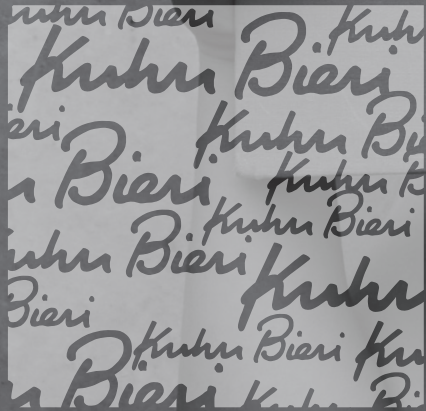


The image shows a person from the chest up, holding an open book in front of their face. The top of their head and hair are visible. The background is a plain, light-colored wall. There are several horizontal teal-colored rectangular overlays on the left side of the image, partially covering the person's arm and the book. The text is positioned in the upper right and lower right corners.

Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi

A rectangular inset showing a sample of handwriting. The text consists of the words 'Kuh' and 'Bier' repeated in various orientations and combinations, written in a cursive script.

Kuh Bier Kuh
Kuh Bier
Bier Kuh Bier
Bier Kuh Bier
Kuh Bier Kuh
Bier Kuh Bier
Kuh Bier Kuh
Bier Kuh Bier

Duschbecken Gleitschutzeinlage

■ Tapis de douche
antidérapant

Duschwannen-Einlage

ca. 55 x 55 cm



- 25550 200 weiß
- 25550 201 beige
- 25550 202 blau

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Die Wanne oder Dusche mit klarem Wasser anfeuchten. Die Sauger fest andrücken und Wasser einlaufen lassen. Badezusatz erst dem einlaufenden Wasser zugeben.

Achtung!

Rutschgefahr, wenn das Badeöl direkt mit der Sicherheitseinlage in Verbindung kommt.

Nach Benutzung mit klarem Wasser abspülen. Zum Trocknen einfach aufhängen.

Zur Beachtung Bei porösem Email kann die Haftfähigkeit nicht gewährleistet werden.



Hochwertiger Soft-Schaum mit Gewebeerstärkung, rutschticher, pflegeleicht.



v15095 Rev.05/06

Behrend
home care

Duschwannen-Einlage

ca. 55 x 55 cm



- 25550 200 weiß
- 25550 201 beige
- 25550 202 blau

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Die Wanne oder Dusche mit klarem Wasser anfeuchten. Die Sauger fest andrücken und Wasser einlaufen lassen. Badezusatz erst dem einlaufenden Wasser zugeben.

Achtung!

Rutschgefahr, wenn das Badeöl direkt mit der Sicherheitseinlage in Verbindung kommt.

Nach Benutzung mit klarem Wasser abspülen. Zum Trocknen einfach aufhängen.

Zur Beachtung Bei porösem Email kann die Haftfähigkeit nicht gewährleistet werden.



Hochwertiger Soft-Schaum mit Gewebeerstärkung, rutschticher, pflegeleicht.



v15095 Rev.05/06



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch