

NEHMEN SIE DEN LEIDENSDRUCK.
MIT DEM RICHTIGEN DRUCK.




UrgoK2

BEI VENÖSEN UNTERSCHENKELULZERA,
VENÖSEN ÖDEMEN UND LYMPHÖDEMEN

 **URGO**
MEDICAL
Healing people®

UrgoK2

IN JEDER LEBENSLAGE DIE RICHTIGE KOMPRESSION

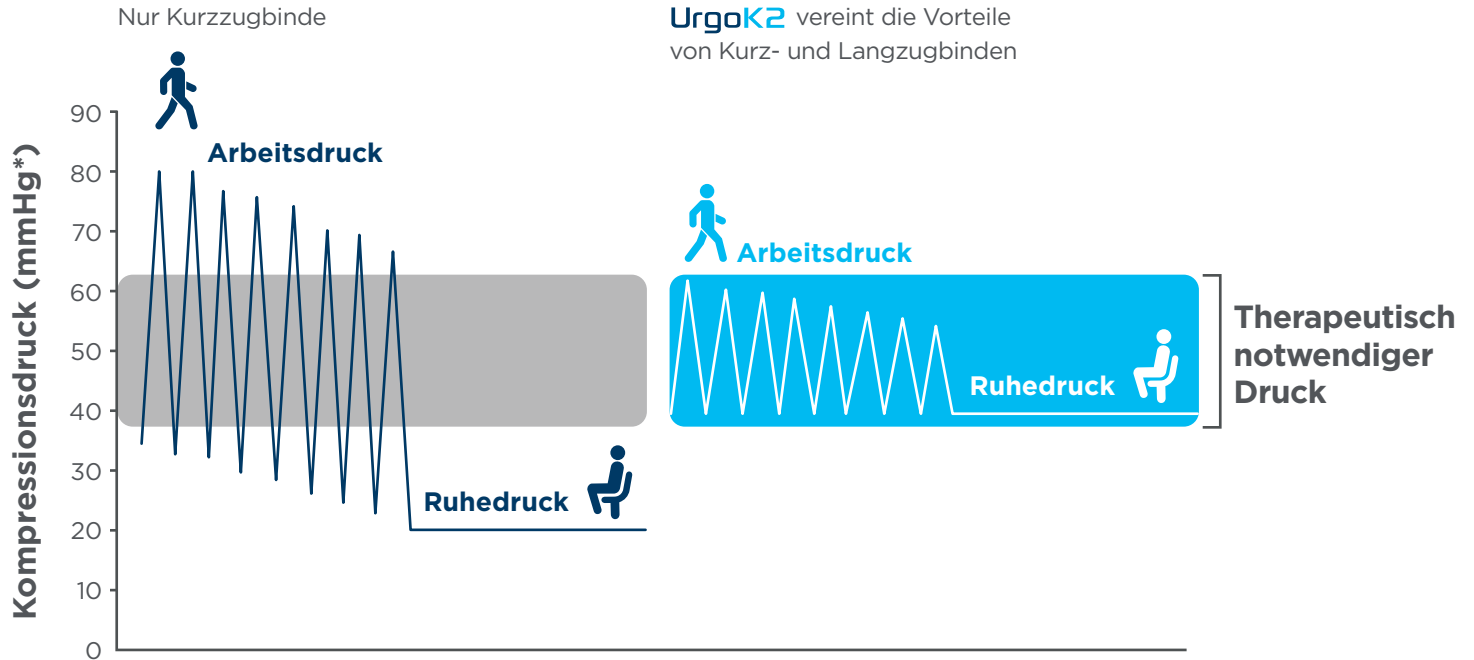

Nach: Jünger M et al. (2009)¹; Partsch H et al. (2003)²

UrgoK2

SO EFFEKTIV UND EINFACH IST KOMPRESSIONSTHERAPIE

Einzigartige Kombination,
die nicht verrutscht



Kurzzugbinde



Langzugbinde



- **KOMPROMISSLOS
WIRKSAM IN RUHE
UND BEWEGUNG**
- **KOMPROMISSLOS
WIRTSCHAFTLICH:
ZEITSPAREND UND
EINFACH**

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

QR-Code scannen
und auf YouTube
Produktanwendung
ansehen



Aufgedruckte **X**
Druck-Indikatoren
auf beiden Binden



kein Druck



therapeutisch
notwendiger Druck

UrgoK2


IMMER DEN THERAPEUTISCH NOTWENDIGEN DRUCK

- **Kompromisslos wirksam** in Ruhe und Bewegung
- **Kompromisslos wirtschaftlich:** zeitsparend und einfach

Knöchelumfang	Bindenbreite	Verkaufseinheit	Art.-Nr.	PHC
 18-25 cm	8 cm	1 Set	SV240103	7240150
	10 cm	1 Set	SV240109	7240173
 25-32 cm	8 cm	1 Set	SV240106	7240167
	10 cm	1 Set	SV240112	7240196



UrgoK2

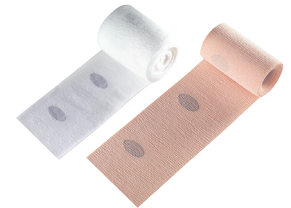Behandlung venöser Unterschenkelgeschwüre, venöser Ödeme und Lymphödeme, die eine starke Kompression erfordern.




ca. 40 mmHg*
KADI** > 0,8

*mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index

Knöchelumfang	Bindenbreite	Verkaufseinheit	Art.-Nr.	PHC
	10 cm	1 Set	SV240503	7240204
	10 cm	1 Set	SV240506	7240210

UrgoK2 Lite

Behandlung von venösen und gemischt arterio-venösen Unterschenkelgeschwüren sowie venösen Ödemen und Lymphödemen, die eine mäßig starke Kompression erfordern.

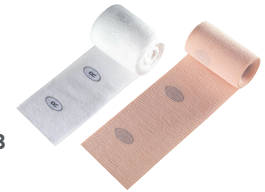

ca. 20 mmHg*
KADI** 0,6 - 0,8


HINWEIS

- Zum Einstieg in die Kompressionstherapie
- Für Patienten, die eine starke Kompression nicht tolerieren
- Aufgedrucktes @ als Druck-Indikator auf der weißen Binde deutet auf die reduzierte Kompression hin

*mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index

UrgoK2

BEHALTEN SIE IMMER DIE VOLLE KONTROLLE

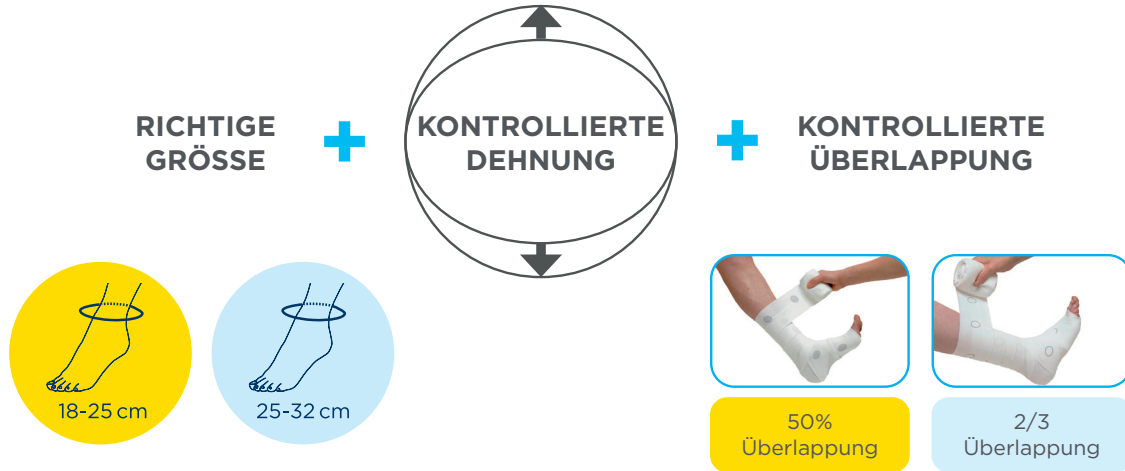

Bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage beachten. *mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index

1: Jünger M et al.: Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care. 2009 Nov;18(11):474, 476-80 2: Partsch H.: Understanding Compression Therapy: EWMA Position Document. Medical Education Partnership Ltd; 2003. Understanding the pathophysiological effects of compression; pp. 2-5

Vertrieb in der Schweiz:

kuhnbieri

Kuhn und Bieri AG | Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz | Telefon 0848 10 20 40 | info@kuhnbieri.ch

URGO
MEDICAL
Healing people®