

Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi

Kuh Bier Kuh
Kuh Bier
Bier Kuh Bier
Bier Kuh Bier
Kuh Bier Kuh
Bier Kuh Bier
Bier Kuh Bier
Kuh Bier Kuh
Bier Kuh Bier

Therapietisch zu Rollstuhl


■ Table pour fauteuil roulant

8



Montageanleitung für THERAPIETISCH 8 R/L c €

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0801

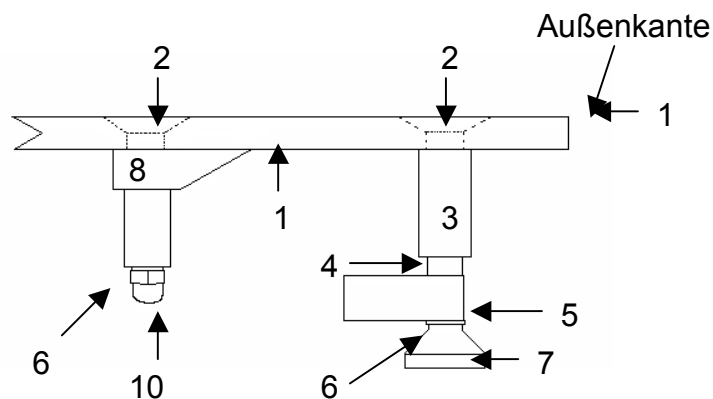

1. Therapietisch-Platte
2. Senkkopfschrauben
3. Distanzleiste außen
4. Höhenausgleichsscheibe
5. Haltewinkel
6. Unterlegscheibe
7. Rändelmutter
8. Neigungsausgleichswinkel
9. Halteschiene
10. Hutmutter

1. Der Therapietisch besteht aus 3 Packstücken: der Therapietisch-Platte (1), den Winkel- und Halteleisten (3, 5, 8, 9) sowie dem Zubehörbeutel, der Schrauben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Rändel- und Hutmuttern enthält.
2. Sorgen Sie für eine absolut saubere, möglichst weiche Montageunterlage. Denken Sie bitte daran, dass Kleinteile, Splitter, Späne und Ähnliches die Therapietisch-Platte (1) verkratzen können.
3. Entscheiden Sie zunächst, ob der Therapietisch linksseitig oder rechtsseitig in Fahrtrichtung des Rollstuhles eingesetzt werden soll. Entfernen Sie danach nur die Folie auf der Unterseite des Therapietisches.
4. Montieren Sie die Winkel, wie in der Skizze und auf dem Foto gezeigt. Stecken Sie zunächst die Senkkopfschrauben (2) in die äußeren Löcher der Therapietisch-Platte (1) und setzen Sie darauf die Distanzleiste (3). Die Schräge der Distanzleiste (3) zeigt dabei innen nach hinten. Einen eventuellen Höhenausgleich für die Armlehne können Sie mit den Distanzscheiben (4) vornehmen. Darauf setzen Sie den Haltewinkel (5). Nun folgen die Kunststoffunterlegscheiben (6) und die Rändelmuttern (7).

Als Nächstes stecken Sie zwei weitere Senkkopfschrauben (2) durch die inneren Langlöcher der Tischplatte. Hierauf stecken Sie den Armlehnenausgleichswinkel (8) und die Arretierungsleiste (9). Zusammen-geschraubt und auf die Breite der Armlehne angepasst wird das ganze durch Unterlegscheibe (6) und Hutmutter (10).

5. Ziehen Sie nun die äußeren Schrauben (2) fest. Schieben oder klappen Sie den Therapietisch auf die Armlehne und drücken Sie die innere Halteleiste mit Ausgleichsleiste soweit an die Armlehne heran, dass der Therapietisch waagrecht oder sogar mittig leicht hoch steht. Ziehen Sie danach die Schraube (2) und Hutmutter (10) fest an.
6. Sie können nun den halben Therapietisch von vorn auf die Armlehne aufschieben oder von der Seite her hochklappen.
7. Prüfen Sie zusammen mit dem Patienten und / oder dem Pflegepersonal, ob der Therapietisch so optimal fest sitzt und benutzt werden kann.
8. Wenn Sie den Therapietisch gemäß dieser Montageanleitung montiert haben und auch die Reinigungs- und Desinfektionshinweise - wie beschrieben - befolgen, werden Sie viele Jahre lang Freude an diesen praktischen Therapietisch haben.

Diese Montage- und Pflegeanleitung ist Bestandteil eines jeden halbseitigen Therapietisches und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung erfolgen.

Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegeanleitung für



Reinigung

Reinigen Sie den Therapietisch mit lauwarmem Wasser unter Zusatz eines neutralen Spülmittels oder mit einem auf dem Markt erhältlichen Kunststoffreiniger. Verwenden Sie dafür ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Fensterleder.

Desinfektion und Sterilisation

MPB - Therapietische aus PET-G zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus. Sie sind gemäß FDA - Richtlinie zugelassen für Lebensmittel-Anwendungen.

Eine Desinfektion der Tischplatte und der Haltewinkel kann mit allen für Kunststoffe und Edelstahl zugelassenen Desinfektionsmitteln erfolgen. Darüber hinaus sind die Tischplatten resistent gegen Benzin, Ethanol, Glyzerin und Terpentin. Vermieden werden sollten in jedem Falle Aceton, Ammoniak, Toluol, Essigsäure, Methanol, sowie Verbindungen daraus.

Die **Tischplatte** selbst ist darüber hinaus sogar **sterilisierbar**.

Kratzer

Kleine Oberflächenkratzer sind leicht mit einer Heißluftpistole zu entfernen. Diese Bearbeitung sollte aber in jedem Falle von einem Fachmann ausgeführt werden.



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch