



**Gebrauchsanweisung / Datenblatt**  
**UV-Schutzbrillen Art.-Nr.: 2274 +1001**

**Verwendungsbereich:**

Die Schutzbrillen dienen ausschließlich dem Schutz vor ultravioletter Strahlung von Höhensonnen, Solarien und medizinischen UV-Strahlungsquellen. Dabei liegt der Anwender/Patient unter oder er sitzt bzw. steht vor dem UV-Strahler.

Keinesfalls darf mit den Schutzbrillen ein Fahrzeug geführt werden. Wegen des zu geringen Gesichtsfeldes und der dadurch gegebenen sekundären Unfallgefahr wie Stolpern, Stoßen gegen seitliche Objekte, seitliche Fahrzeuge usw. sind die Schutzbrillen auch nicht zum Herumlaufen vorgesehen. Sie dürfen also nur stationär benutzt werden.

**Gebrauch:**

Vor dem Gebrauch ist die Länge der Gummikordel auf die jeweilige Kopfgröße abzustimmen.

Vor dem Einschalten des UV-Strahlers ist die Schutzbrille aufzusetzen und so anzupassen, dass der gesamte Augenraum beider Augen vollständig abgedeckt ist und auch seitlich keine Streustrahlung in den Augenraum gelangen kann.

Beachten Sie bitte, dass UV-Strahlung zu einer sehr schmerzhaften Bindehautentzündung führen kann. Blicken Sie deshalb nie mit ungeschütztem Auge in eine UV-Strahlungsquelle. Beachten Sie bitte weiterhin, daß UV-Strahlung für das menschliche Auge unsichtbar ist und Sie deshalb den Grad der Gefährdung nicht einschätzen können.

Eine Bewertung der UV-Gefahr nach dem sichtbaren Strahlungsanteil ist in jedem Falle falsch. Beschädigte Schutzbrillen, die Brüche, Löcher oder ausgebleichte Stellen aufweisen, dürfen in keinem Fall nochmals benutzt werden. Stellen Sie solche Effekte fest, so wenden Sie bitte sofort eine neue Schutzbrille an.

**Warnung:**

Bestrahlen Sie sich nie mit ultravioletter Strahlung ohne einem Schutz beider Augen. Halten Sie sich immer streng an die vom Hersteller des Bestrahlungsgerätes vorgeschriebenen Bestrahlungsabstände und Bestrahlungszeiten.

**Reinigung und Aufbewahrung:**

Damit die Schutzbrille nicht verkratzt, empfehlen wir Ihnen, die Brille in einem Etui aufzubewahren und nur unter fließendem Wasser mit Spülmittel zu reinigen und sie mit einem Papiertaschentuch abzutrocknen. Die Schutzbrillen sind staubfrei und trocken in Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +80 °C aufzubewahren.

**UV-Transmission:**

Alle schädlichen ultravioletten Strahlungen unterhalb von 400 nm werden vollständig von der Schutzbrille absorbiert. Damit wird ein zuverlässiger Schutz ihrer Augen gewährleistet.

**Zertifizierung:**

Die Schutzbrillen sind auf Konformität mit den Anforderungen der EU-Direktive 89/686/EWG geprüft worden. Als Zeichen der Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie tragen sie die CE-Kennzeichnung

**Zertifizierungsstelle:**

**DIN CERTCO**  
**Westliche 56**  
**75172 Pforzheim**

