



Tytex A/S

Industrivej 21, 7430 Ikast, Dänemark

www.tytex.com

Kundenbetreuung:

E-mail: customerservice@tytex.com

International: +45 9660 4202

Nord- und Lateinamerika: 1-855-569-6131

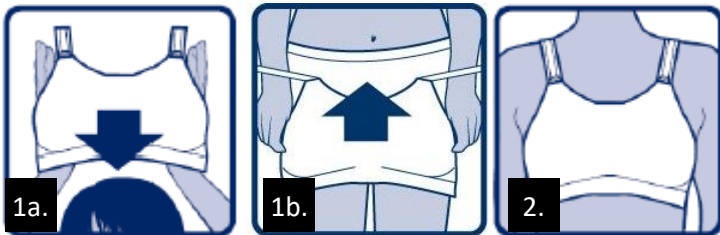
Hergestellt in der Slowakei

Indikation:

Medizinisches Produkt für den Gebrauch nach chirurgischen Eingriffen wie Brustoperationen oder allgemeinen Operationen, wenn die volle Beweglichkeit wiedererlangt wird. Ebenso geeignet bei Strahlentherapie (der BH enthält keine Metallteile).

Eigenschaften:

Für leichte Fixierung und Komfort. Bietet Wund- und Narbenschutz sowie Schutz für die bestrahlte Stelle.

Gebrauchsanweisung:

- 1) Ziehen Sie ihn über Ihren Kopf (1a) oder von hinten herauf, als wäre er Teil Ihrer Unterwäsche (1b)
- 2) Stellen Sie den BH ein und vergewissern Sie sich, dass er keine Falten wirft

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Fragen bezüglich des Gebrauchs und dem korrekten Anbringen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal. Vergewissern Sie sich, dass unter dem BH getragene Bandagen und/oder Drainageleitungen unterhalb des BHs ordnungsgemäß anliegen, um Druckstellen und/oder Behinderungen des Flusses der Drainageleitungen vorzubeugen. Bei unerwarteten Beschwerden oder Wundirritationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal

Material:

60 % Baumwolle, 25 % Polyamid, 15 % Elasthan

Pflege:

Weiß



Gebrauchsanweisung - Komfort-BH, Celia

140°F

Farbe



104°F

Mit ähnlichen Farben und in einem Wäschenetz waschen. Der Gebrauch von chlorbasierter Bleiche bzw. chlorbasierten Desinfektionsmitteln wird Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für die künftige Verwendung gut auf