



DE LIPIDOKOLLOID-GAZEWUNDAUFLAGE GETRÄNKT MIT SILBERSALZ

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTül Ag/Silver ist eine mit Silbersalz getränkte Lipidokolloid-Wundauflage. Sie basiert auf der Lipidokolloidtechnologie (TLC), einer von Laboratoires URGO entwickelten Innovation.

UrgoTül Ag/Silver basiert auf der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag=Silbersalz) aus einem Polyestergerüst getränkt mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Vaseline, Kohäsionspolymeren und Silbersalz.

UrgoTül Ag/Silver ist nicht haftend, nicht okklusiv und verklebt nicht mit dem Wundbett.

EIGENSCHAFTEN

In Kontakt mit dem Wundexsudat gelieren die Hydrokolloidpartikel (CMC) und verbinden sich mit der Matrix um einen lipidokolloiden Film zu bilden.

Daraus resultieren folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, welches die Heilung begünstigt
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde
- atraumatisches Ablösen zum Schutz des neu gebildeten Gewebes
- schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten
- Schutz der Wundumgebung

Des Weiteren verleihen die in der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix enthaltenen Silberionen (Ag+) **UrgoTül Ag/Silver** eine antibakterielle Wirksamkeit, die in der Lage ist, die lokale bakterielle Besiedlung zu reduzieren.

Silber zeichnet sich durch ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum aus, einschließlich gramnegativer und grampositiver Bakterien sowie bestimmter Pilze und Hefen. Es ist besonders wirksam gegen *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* und *Pseudomonas aeruginosa* (*Bacillus pyocyaneus*), welche am häufigsten verantwortlich sind für infizierte Wunden.

In-vitro konnte die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage während einer Dauer von bis zu 7 Tagen nachgewiesen werden. Die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage trägt außerdem zu einer Geruchsreduzierung bei.

ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTül Ag/Silver ist für die lokale Behandlung von Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet: chronische Wunden (Druckgeschwüre und Unterschenkelgeschwüre) und akute Wunden (Verbrennungen zweiten Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, etc).

Da die Wundauflage nicht haftet, ist **UrgoTül Ag/Silver** besonders für die Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung reinigen. Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor der Anwendung von **UrgoTül Ag/Silver** sorgfältig mit physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Wenn es notwendig ist kann **UrgoTül Ag/Silver** mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage der Wunde anzupassen.
- Die Schutzfolien von der Wundauflage entfernen.
- **UrgoTül Ag/Silver** direkt auf die Wunde auflegen.
- Bedecken Sie **UrgoTül Ag/Silver** mit einem Sekundärverband (sterile absorbierende Kompresse, die mit einer Fixierbinde an Ort und Stelle gehalten wird).
- Einen Kompressionsverband anlegen, sofern dieser verordnet wurde.
- **UrgoTül Ag/Silver** sollte alle 1 bis 3 Tage, in Abhängigkeit von der behandelten Wunde und ihrem Heilungsverlauf, gewechselt werden.
- Die maximale Behandlungsdauer mit **UrgoTül Ag/Silver** beträgt einen Monat.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Behandlung mit **UrgoTül Ag/Silver** sollte unter medizinischer Aufsicht erfolgen.
- Die Anwendung der Wundauflage schließt die Notwendigkeit einer geeigneten systemischen antibakteriellen Behandlung von infizierten Wunden in Übereinstimmung mit lokalen Richtlinien nicht aus.
- **UrgoTül Ag/Silver** haftet an chirurgischen Latexhandschuhen. Es wird daher empfohlen diese mit physiologischer Kochsalzlösung anzuweichen, um die Handhabung zu erleichtern.
- Die kombinierte Anwendung mit anderen lokalen Behandlungen wird nicht empfohlen.
- Da keine spezifischen klinischen Daten vorliegen, nicht bei schwangeren und stillenden Frauen, Neu- und Frühgeborenen anwenden.
- Das medizinische Fachpersonal muss berücksichtigen, dass Daten zur langfristigen und wiederholten Anwendung einer silberhaltigen Wundauflage, insbesondere bei Kindern oder Neugeborenen, nur sehr begrenzt vorliegen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Elektroden oder leitenden Gelen während Untersuchungen mit elektronischen Geräten, z.B. EEG und EKG.
- Nicht in einer Überdruckkammer anwenden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- (*)Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Nicht anwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.
- Nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

- Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Bestandteilen der Wundauflage.
- Nicht bei Patienten anwenden, die mit Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht werden.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH ; Justus-von-Liebig Str. 16 ; 66280 Sulzbach

CE 2797 (2006)



(2020-01)

STERILE R

