

WIR EMPFEHLEN

vor der ersten Anwendung

DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

durchzulesen!

epad^R



Die aktuellste Version
der Gebrauchsanweisung
finden Sie immer auf unserer Homepage:
www.epads.at



eppad^R

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das ePAD Relax entschieden haben und wünschen Ihnen bei der Anwendung viel Entspannung und ein gutes Gefühl von Wohlbefinden.

Schon in der frühen Geschichte nutzten die Menschen die positive Wirkung der Magneten. Das Magnetfeld der Erde ist eine der ältesten Kräfte unseres Planeten und beeinflusste schon immer die Tier- und Pflanzenwelt. Auch für uns Menschen ist das Erdmagnetfeld überlebenswichtig. Es gibt uns Energie und schützt uns vor kosmischer Strahlung. Der Körper erhält die Energie zurück, die er im Alltag durch diverse Umwelteinflüsse verliert.

Sie haben mit dem ePAD Relax nun die Möglichkeit, Ihr ganz „privates“ Magnetfeld immer und überall zu nutzen.

ENERGIE – ENTSPANNUNG – MOBILITÄT

Egal wo auch immer, nach dem Sport, bei längeren Fahrten im Auto, im Büro, zu Hause oder auf Reisen. Immer wenn Sie das Bedürfnis nach Entspannung verspüren, soll der ePAD Relax nun Ihr ständiger Begleiter sein.

Die folgenden Seiten dieser Bedienungsanleitung informieren Sie über sämtliche Details einer problemlosen Verwendung.

Viel Spaß und Wohlbefinden bei der Anwendung wünscht Ihnen

Ihr ePAD-Team

*Wir arbeiten mit
der Energie der Erde!*

1. ZEICHENERKLÄRUNG



Bedienungsanleitung lesen!



Nicht Feuer aussetzen!



Nicht im Restmüll entsorgen!



Wiederaufladbar!




Nicht Wasser aussetzen!



LIEFERUMFANG:


ePAD RELAX

- a) Steuergerät
- b) Ladegerät
- c) Ladekabel
- d) ePAD
- e) Bedienungsanleitung

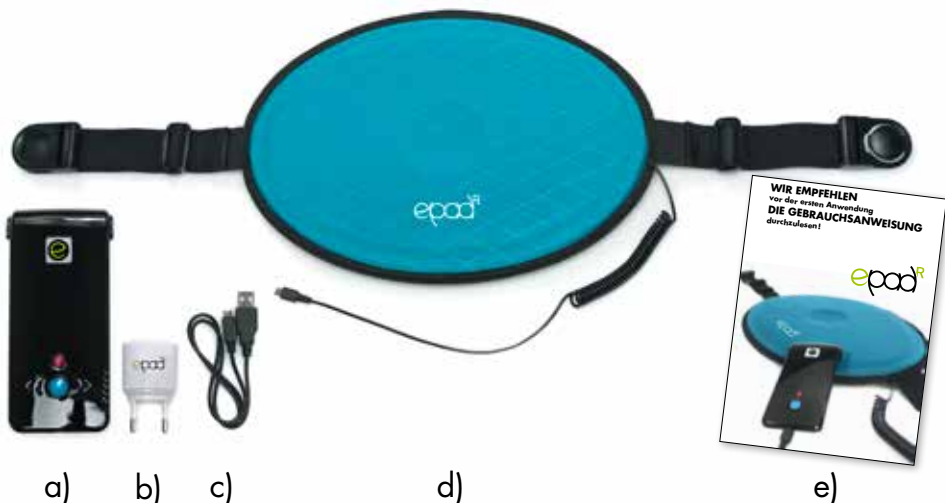

2. BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Der ePAD Relax ist ein mobiles und pulsierendes Magnetfeldstimulationsgerät, mit dem sie lokale Problembereiche optimal behandeln oder einfach nur Energie tanken können.

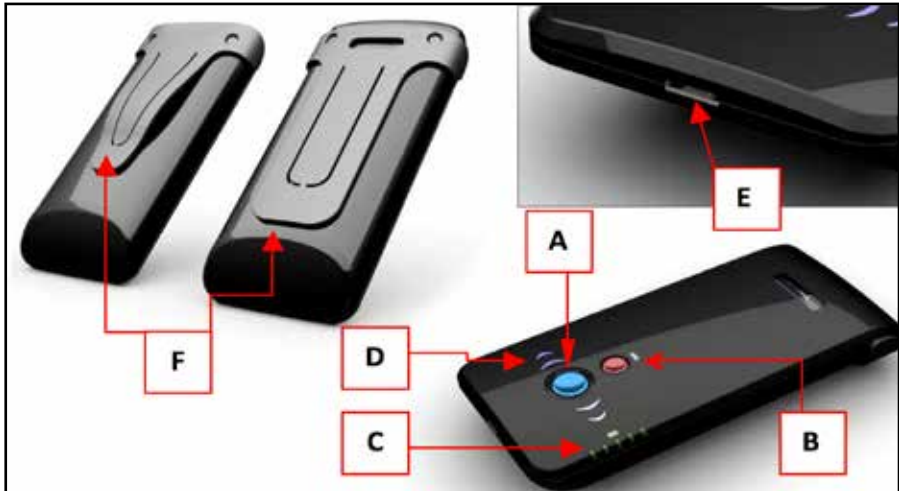

- A** Ein-/Aus-Taste + Programmwahl
- B** Akkucheck (s. S. 8)
- C** Akkuladestatusanzeige
- D** Programmanzeige
- E** Anschluss für ePAD Relax / Anschluss für Ladekabel
(NEU mit USB-Anschlusskabel)
- F** Gurtclip

Das Steuergerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

KONTRAINDIKATIONEN

Personen mit elektronischen Implantaten, bei Schwangerschaft und Personen mit Epilepsie sollten kein Magnetfeld verwenden.

3. TECHNISCHE DATEN

- IMPULSFORM:** Rechteckfrequenz
- FREQUENZ:** 3 Hertz, 5 Hertz, 8 Hertz
- STROMVERSORGUNG:** **wiederaufladbarer*** Lithium-Ionen Akku, (4000 mA, 3,6 Volt), Micro-USB
Für das Aufladen des Akkus verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladegerät.
- AKKULEISTUNG*:** ist abhängig von Frequenz und Temperatur (bei 20° C / 68° F) ca. 5–6 Stunden
- LAGERTEMPERATUR:** –20° C bis +40° C / –4° F bis 113° F
- KERNMATERIAL:** EVA-Schaumstoff
- OBERMATERIAL:** Polyamid
- STEUERGERÄT:** Kunststoff

WICHTIG: Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Steuergerät mindestens 8 Stunden durchgehend auf.

*** Die Batteriebensdauer variiert je nach Umgebungstemperatur und Programmwahl!**

WICHTIGER HINWEIS ZUR ENTLADUNG DES AKKUS!

Sollten Sie das Gerät bis zur völligen Entladung des Akkus benutzt haben (rot blinkendes LED) oder die Ladung ungewöhnlich lange dauern (über 8 Stunden) dann drücken Sie bitte den roten Knopf 10 Sek. lang (Resetfunktion), stecken das Gerät kurz vom Ladekabel ab und laden das Steuergerät nun nochmals auf.



RESET
mind. 10 sec. Drücken
(kein optisches Signal)

4. GARANTIE/GEWÄHRLEISTUNG

Die MAS medizinische Produkt Handel GmbH gewährt dem Erstkunden/Erstkäufer des ePAD Relax eine Garantie von 2 (zwei) Jahren ab Kaufdatum. Sie kann nur unter Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg sorgfältig auf. Diese Garantie erstreckt sich auf das Steuerggerät und auf den Applikator und deckt alle Mängel ab, die auf eine schlechte Qualität des Materials bzw. eine fehlerhafte Herstellung zurückzuführen sind.

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

- der Akku
- eine Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall oder unsachgemäße Handhabung sowie Missachtung wichtiger Hinweise
- gesprungene und zerbrochene Gehäuse
- ausgezogene Kabel bzw. Beschädigungen an den Steckverbindungen
- Eigenreparaturversuche bzw. der Selbstaustausch des Akkus

Die gewährte Garantie schränkt weder die gesetzlich geregelten Rechte des Verbrauchers nach dem jeweils geltenden nationalen Recht, noch die Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Händler aus dem zwischen beiden geschlossenen Kaufvertrag ein.

ACHTUNG!

Serviceleistungen und Reparaturen bzw. ein eventuell notwendiger Austausch des Akkus darf nur vom Hersteller oder autorisierten Fachbetrieben vorgenommen werden. Bei Nichteinhaltung entfällt der Garantieanspruch!

RÜCKSENDUNG IM GARANTIEFALL:

Im Garantiefall ist das Gerät an MAS zurückzuschicken. Bei Rücksendung eines Gerätes im Rahmen der Garantie trägt der Käufer die Kosten für den Versand an MAS, während MAS die Kosten für die Rücksendung zum Käufer übernimmt.

5. PFLEGE UND WARTUNG

Die nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, die Garantiebedingungen zu erfüllen.

- Reinigen Sie die Auflagefläche des ePAD Relax regelmäßig mit einem feuchten (nicht zu nassen) Tuch und lassen Sie ihn dann an der Luft trocknen.
- Legen Sie den ePAD Relax nicht auf eine Wärmequelle (Heizung, Kachelofen etc.).
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Scheuermaterialien (wie zum Beispiel chemische Reinigungsmittel oder Stahlwolle).
- Geben Sie den ePAD Relax niemals in eine Waschmaschine oder in den Trockner.
- Bewahren Sie den ePAD Relax immer an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Den USB-Stecker immer vorsichtig vom Steuergerät trennen.
- Das Steuergerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

6. ENTSORGUNG

Zum Schutz der Umwelt sollte das Steuergerät inkl. Akku als Sondermüll entsorgt werden. Vielen Dank!

7. BEDIENUNG

STEUERGERÄT

Sie nehmen das Steuergerät und schließen es an dem Verbindungskabel mit dem Applikator an. Nun drücken Sie auf den roten Knopf **(B)**, um den Akkuladezustand zu prüfen.

Er zeigt Ihnen an, in welchem Ladezustand sich der Akku befindet. Je höher die Anzahl der leuchtenden grünen Dioden **(C)**, desto besser ist der Ladezustand Ihres Akkus.



GURT ANLEGEN

Sie hängen die elastischen Spannungsurte in die dafür vorgesehenen Laschen und passen die Länge der Gurte je nach der gewünschten Anwendung an.



STARTEN DES ePAD UND PROGRAMMWahl:

(Details zur Anwendung der Programme finden Sie auf **Seite 11**)



1 x grünen Knopf **(A)** drücken:
Die beiden Wellen blinken **ROT (D)**.
Das **Vitalprogramm (8 Hertz)** ist aktiv.



2 x grünen Knopf **(A)** drücken:
Die beiden Wellen blinken **BLAU (D)**. Das
Entspannungsprogramm (5 Hertz) ist aktiv.



3 x grünen Knopf **(A)** drücken:
Die beiden Wellen blinken **GRÜN (D)**. Das
Schlafprogramm (3 Hertz) ist aktiv.

4 x grünen Knopf **(A)** drücken: Die beiden Wellen blinken nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.

Blinken beide Wellen **(D)** alle **4 Sek.** ist das Gerät in Betrieb.
Sie können nun das Steuergerät am Gurtclip **(F)** befestigen. Nach
25 Minuten schaltet das Steuergerät automatisch ab und das Pro-
gramm ist beendet. Sie können jederzeit das laufende Programm
durch Drücken des grünen Knopfes **(A)** abbrechen und in ein an-
deres Programm wechseln oder das Programm nochmals starten.

STEUERUNGSGERÄT RICHTIG BEFESTIGEN



ANWENDUNGSBEISPIELE:

BÜRO



AUTO



FEHLERBEHEBUNG

FEHLERBILD

Kein Licht leuchtet

Rechte Welle leuchtet nicht

URSACHE

Akku leer

Kontaktunterbrechung

ABHILFE

Steuergerät an Ladegerät anschließen

USB-Steckverbindung überprüfen

8. ANWENDUNG



VITALPROGRAMM

Das gefühlte Energiepotential unseres Körpers bestimmt unseren Tag. Fühlen wir uns schlapp, dann sind wir schnell überfordert. Fühlen wir uns aber vital und energiegeladen, wirft uns nichts aus der Bahn! Das Vitalprogramm des ePAD Relax hebt den Körper in einen aktiven, entspannten Wachzustand. Seine spezielle Frequenz fördert ruhige Konzentration und Aufnahmefähigkeit. Verwenden Sie das Vitalprogramm zum Aufladen der inneren Batterien und als Vorbereitung auf Höchstleistungen!



ENTSPANNUNGSPROGRAMM

Das Aktivitätsniveau unseres Körpers lässt sich oft nicht so einfach steuern. Wenn wir gestresst sind fällt es schwer sich wirklich zu entspannen, selbst wenn die Zeit dazu gekommen ist. Das Entspannungsprogramm des ePAD Relax fördert die natürliche Regulation unserer Aktivität. Nach einer Zeitperiode der Überaktivität oder nervlichen Anspannung (Stress!) kommt unser Körper wieder auf ein normales Aktivitätspotential zurück. Nutzen Sie das Entspannungsprogramm in Ihren Ruhepausen!



SCHLAFPROGRAMM

Ausreichend tiefe Entspannung ist für unsere geistige Leistungs- und Belastungsfähigkeit ein äußerst wichtiger Faktor. Ständig kreisende Gedanken oder, noch schlimmer, handfeste Schlafstörungen behindern unsere Fähigkeiten. Die Frequenz des Schlafprogramms entspricht den Gehirnströmen des Menschen im Tiefschlaf (Delta-Wellen). Der Körper beruhigt sich und Regeneration wird aktiv gefördert. Verwenden Sie das Schlafprogramm bei beruhigender Meditation oder beim Einschlafen.

COPYRIGHT 2011 – MAS medizinische Produkt Handel GmbH

Bedienungsanleitung ePAD Relax. Version 1.1, gültig ab 1. September 2011. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, oder Übersetzung gemäß des Urheberrechts-Gesetzes nur mit schriftlicher Genehmigung von MAS.

MAS medizinische Produkt Handel GmbH

Hauptstraße 50, A-8431 Gralla, www.mas.at

Garantiekarte

Bitte füllen Sie alle Punkte in BLOCKSCHRIFT aus, und legen die Garantiekarte und den Kaufbeleg der Rücksendung bei.

Seriennummer:

Kaufdatum:

Name:

Adresse:

Fehlerbeschreibung:

Händlerstempel:

