

**Sideveis armstøtte.
TOPRO Taurus**

**Innhold: 2 x 814647/sidestøtte
1 x 814647M1 Monteringsanvisning**

*Content: 2x814647/Side support
1x814647M1 Fitting instructions*

**Innhold: 2x814647/ Ellbogen-Pelotte
1x814647M1 Anbauanleitung**

1



1.Skru ut skruen under armputen.

1. Unscrew the screw that is located under the armrest

1. Entfernen Sie die Schraube, die sich unter dem Armlehnenpolster befindet

2




2. Bytt skiven med Sidestøtten.

2.Replace the washer with the sides support

2. Ersetzen Sie die Beilagscheibe durch die Ellenbogen-Pelotte

3

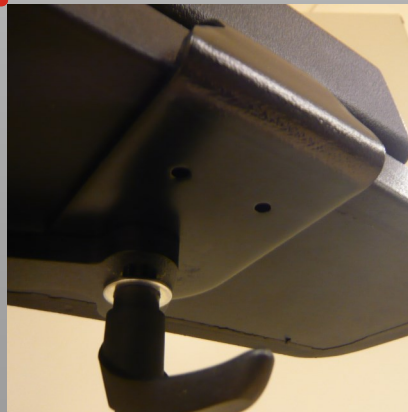

**3. Sett skruen på plass, men ikke helt fast. Juster side-
støtten til ønsket posisjon. Skru til slutt skruen godt fast.**

**3. Put the screw back in place. Adjust the side support to the
required position. Tighten the screw.**

**3. Setzen Sie die Schraube wieder an ihren Platz. Bringen Sie die
Pelotte in die gewünschte Position. Drehen Sie die Schraube wie-**