

# ACTIDOOR

MIT 868 MHz EASYWAVE® FUNKSENDER

DIE KABELLOSE LÖSUNG FÜR DEMENTE UND STURZ-  
GEFÄHRDETE PERSONEN

## 1 SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch der Actidoor muss diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

### HINWEISE FÜR DAS PFLEGEFACHPERSONAL

- Der Actidoor dient lediglich zur Unterstützung des Pflegefachpersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz ist die Actidoor auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

### HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Die elektrische Montage und Inbetriebnahme des Produkts darf nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. ESD-Schutz beachten.

## 2 PRODUKTBESCHREIBUNG

### 2.1 BESCHRIEB FUNKSYSTEM

Der Actidoor mit 868 MHz EasyWave® ACTICOM Funk- sender ist u.a. kompatibel zu dem RCL07-Funkempfänger von ACTICOM. Der RCL07 kann Funksignale verschiedener ACTICOM-Funksender empfangen und sie an eine kabelgebundene Rufanlage weiterleiten. Detaillierte Informationen zu diesem und weiteren kompatiblen 868 MHz EasyWave® Geräten finden Sie auf folgender Webseite: [www.acticom.ch](http://www.acticom.ch)



### 2.2 ANWENDUNGSBEREICHE UND FUNKTION

Actidoor wurde vorwiegend für den Einsatz in Alters- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Psychiatrien, sowie für betreutes Wohnen konzipiert. Die dort notwendige Pflege und Beaufsichtigung von dementen und Sturzgefährdeten Bewohnern stellt für das Betreuungspersonal einen erhöhten Pflegeaufwand dar.

Actidoor ist die ideale Unterstützung: Sturzrisiken sowie Gefahren, die sich durch Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden. Sensor kann per ON-OFF-Schalter ein- oder ausgeschaltet werden.

Actidoor verfügt über einen empfindlichen Sensor, welcher mit einer 12 V-Batterie auskommt.

Der RCL07 wird über die Steckverbindung des Ruftasters an die Rufanlage angeschlossen. Sobald die Person das Zimmer verlassen will und die Türe öffnet, wird über den RCL07 ein Alarm an die Rufanlage gesendet. Das kabellose Funksystem ermöglicht einen flexiblen Einsatz.

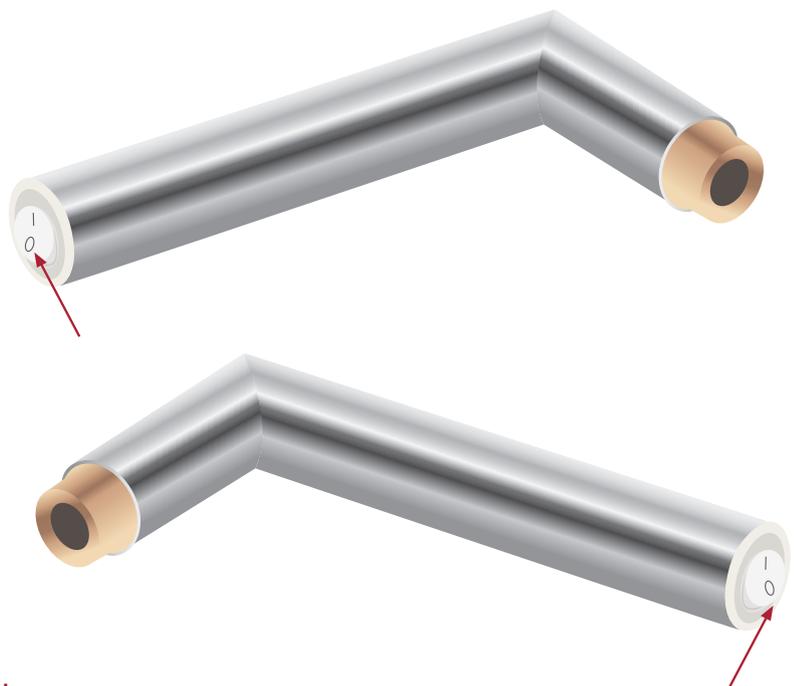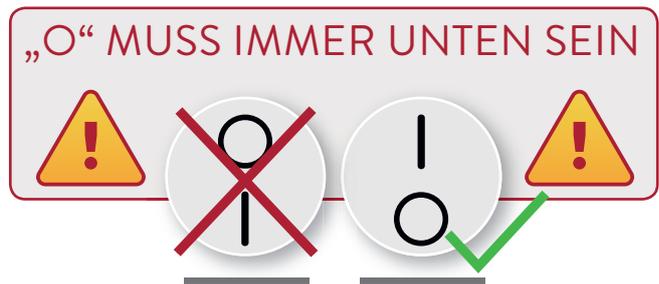

## 3 REINIGUNG & DESINFEKTION

- Actidoor kann mit handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln mit max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden.
- Keine ätzenden Mittel verwenden
- Den Actidoor trocken und sauber bei 0°C bis + 55°C lagern.

## 4 FUNKSYSTEM IN KOMBINATION MIT KABELGEBUNDENER LICHTRUFANLAGE

### 4.1 KONFIGURATION RCL07-FUNKEMPFÄNGER

Die Steckverbindung des RCL07 an das Rufsystem muss durch eine Fachkraft vorgenommen werden. Pro Actidoor ein RCL07-Funkempfänger installiert. Verlässt eine Person ein zugeordnetes Zimmer, wird ein Alarmsignal an den RCL07 übertragen. Actidoor sendet solange, wie er betätigt wird, jedoch max. 10 Sekunden. Im Stand-by-Modus leuchtet die LED nicht. Die Werkeinstellung ist Totmann Funktion.


### 4.2 PROGRAMMIERUNG DES FUNKSENDERS

– Actidoor auf einen RCL07 einlernen: während die Türe sich im geschlossenen Zustand befindet Programmieraste kurz drücken (<1.6 Sekunden). Danach blinkt die LED. Actidoor mittels Betätigung (dazu die Türe öffnen) einlernen. Bei erfolgreicher Programmierung leuchtet die LED. Um wieder in den Betriebsmodus zurückzukehren, Programmieraste erneut kurz drücken.

– Actidoor auf RCL07 löschen: Programmieraste länger als 1.6 Sekunden drücken, bis die LED schnell beginnt zu blinken. Der Löschmodus wird aktiviert. Danach Actidoor betätigen. Die LED leuchtet kurz auf. Nun ist die Funkverbindung gelöscht. Um wieder in den Betriebsmodus zurückzukehren, Programmieraste kurz drücken.

HINWEIS: Der Actidoor und RCL07 Funkempfänger bildet ein Rufsystem. Sie sollten eindeutig gekennzeichnet werden, so dass sie nicht vertauscht werden können. Damit wird sichergestellt, dass der Ruf nur bei derjenigen Person ausgelöst wird. Siehe Seriennummer der Actidoor und Empfänger!

### 4.3 BATTERIEWECHSEL

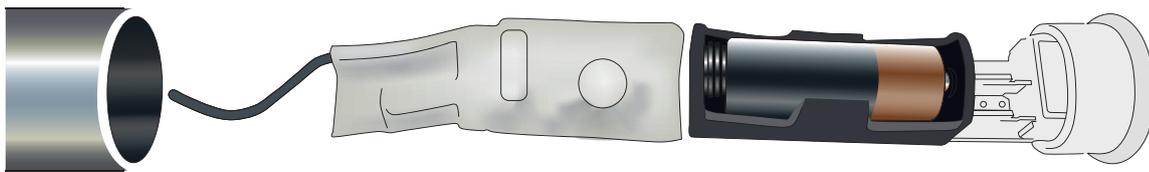

## 7 TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

Artikel	Actidoor
Masse (LxBxH)	20x130x70 mm
Gewicht (kg)	130 Gramm
Farbe	chromstahl
Oberfläche	glatt
Chemische Beständigkeit	Wasser (Raumtemperatur), Körperflüssigkeiten, handelsübliche Desinfektionsmittel, max. 70 Vol% Alkohol

## 5 WARTUNG & FEHLERSUCHE

Actidoor ist bis auf Batteriewechsel wartungsfrei. Sollte die Funktion trotzdem nicht gewährleistet sein, sind folgende Schritte zu prüfen:

- Ist RCL07- Rufempfänger im Betrieb und richtig angeschlossen?
  - Ist Actidoor korrekt auf den RCL07 eingelernt?
  - Ist der Magnet korrekt angebracht?
- Sind die erwähnten Punkte erfüllt, aber die Funktionen der Actidoor ist trotzdem nicht gewährleistet, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal.

## 6 ENTSORGUNG

Der Funksender und der dazugehörige Sensor sind bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben, die dafür sorgt, dass die Bauteile recycelt, behandelt und umweltverträglich entsorgt werden.

Weitere Informationen zu den für Sie erreichbaren Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem Abfallentsorger.

Funkprotokoll	ACTICOM EasyWave®
Funkfrequenz	868.3 MHz
Lebensdauer	Je nach Anwendung ca. 10 Jahre
Funkreichweite	100 m (im freien Feld) 30 m (im Gebäude)
Batterietyp	12 V A21
Schutzart	IP 54
Umgebungstemperatur	0 bis +55° C
Normenkonformität	R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG Die vollständige Konformitätserklärung als PDF: <a href="http://www.acticom.ch">www.acticom.ch</a>

