

Produktbeschreibung:

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz ist eine Flüssigkeit aus Polymeren, die, wenn sie auf die Haut aufgetragen wird, einen gleichbleibenden Film bildet. Cavilon Reizfreier Hautschutz ist eine nicht-zelltoxische, schmerzfreie Lösung. Sie schützt intakte oder geschädigte Haut vor Irritationen, hervorgerufen durch Stuhl- oder Urininkontinenz und anderen Körperflüssigkeiten wie Exsudat, sie schützt ebenfalls vor Klebstoffen und Reibung. Der Film ist farblos, transparent und besitzt eine gute Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit.

Inhaltsstoffe:

Hexamethyldisiloxan, Isooctan, Acrylatterpolymer, Polyphenylmethylsiloxan

Indikationen:

3M Cavilon Reizfreier Hautschutz wird als Flüssigkeit verwendet, die nach dem Aufbringen auf gesunde sowie geschädigte Haut eine Langzeit-Barriere gegen Feuchtigkeit bildet und die Haut vor Stuhl- oder Urininkontinenz, Klebstoffen und Reibung schützt. Dieses Produkt ist für Erwachsene, Kinder und Babys ab dem 1. Monat als Primärbarriere gegen Reizungen infolge von Körperflüssigkeiten vorgesehen.

Kontraindikationen:

Der 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz sollte in folgenden Fällen NICHT verwendet werden:

1. Als einzige Abdeckung, wenn ein Schutzverband gegen bakterielle Kontamination / Penetration erforderlich ist, z.B. an Stellen für intravenöse Kathetherapie und Wunden mit teilweiser oder voller Tiefe.
2. An infizierten Hautstellen.

Warnhinweis:

In flüssiger Form ist der 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz leicht entzündlich; daher nur in gut belüfteten Räumen verwenden! Gebrauch in der Nähe von offenen Flammen und Brandquellen vermeiden. Von Kindern fernhalten! Der Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Sollte dies doch geschehen, spülen Sie die Augen gut mit Wasser aus.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Wenn Rötung oder sonstige Anzeichen von Irritationen auftreten oder diese Anzeichen länger andauern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
2. Die Verwendung von anderen Schutzmitteln, Salben, Cremes oder Lotionen kann die Wirksamkeit dieses Produktes wesentlich beeinträchtigen.
3. Der Inhalt der Sprayflasche ist steril, solange Sie verschlossen und unbenutzt ist.

Anwendungshinweise:

1. Die Haut sollte vor dem Aufbringen von 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz gründlich gereinigt und trocken sein.
2. Schaumstoffapplikator oder Tuch: Eine gleichmäßige Schicht über den ganzen betroffenen Bereich auftragen. Spray: Die Spraydüse 10 bis 15 cm von der Haut entfernt halten, und mit einer gleichmäßigen Bewegung den ganzen betroffenen Bereich besprühen.
3. Wurden einige Stellen ausgelassen, wiederholen Sie die Applikation mit 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz in diesem Bereich erst, nachdem die erste Schicht ausreichend (etwa 30 sek.) trocknen konnte.

4. Wenn Cavilon Reizfreier Hautschutz In Hautfalten oder auf Stellen, wo Haut auf Haut Kontakt besteht, aufgetragen werden soll, trennen Sie die Hautkontaktstellen, bis der Film vollständig getrocknet ist.
5. Bei Gebrauch unter Pflastern, Wundverbänden oder anderen Vorrichtungen:
(a) Den 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz vor dem Abdecken dieser Stellen gründlich trocknen lassen.
(b) Der 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz muss vor jedem neuen Verband und/oder Wechsel von Pflastern neu aufgebracht werden; die Schutzbarriere wird mit dem Pflaster entfernt.
6. Bei Verwendung als Schutz gegen Körperflüssigkeiten, Stuhl- oder Urininkontinenz usw., wenn keine Heftpflaster auf die Haut aufgebracht werden:
(a) Die erneute Applikation von Cavilon Reizfreier Hautschutz empfiehlt sich alle 48-72 Stunden, je nachdem wie häufig die Haut gereinigt wird.
(b) In Extremfällen (z.B. ständige Diarrhöe), wo eine häufige Reinigung erforderlich ist, KANN es nötig sein, Cavilon Reizfreier Hautschutz öfter zu applizieren (z.B. alle 12-24 Stunden).
7. Falls gewünscht, kann der Film mit den meisten in der Medizin für diese Zwecke üblichen Mittel entfernt werden, wobei die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu befolgen sind. Die betroffene Stelle säubern und trocknen, und den 3M Cavilon Reizfreier Hautschutz wieder auftragen.
8. Um unbeabsichtigtes Sprühen zu verhindern, ist die Düse bei Nichtgebrauch stets mit der Kappe verschlossen zu halten.

Angaben zur Bestellung:

1. Tupfer: 1 ml und 3 ml, einzeln verpackt, nur für den Einmalgebrauch. Steril solange Packung ungeöffnet oder unbeschädigt ist.
2. 28 ml Spray-Flasche: Der Inhalt ist bis zum ersten Gebrauch steril.

Erklärung der Symbole:



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Gamma - sterilisiert



Nicht zur Wiederverwendung.



Entflammbar



Der Karton und die Sanduhr kennzeichnen die Lotnummer und das Verfallsdatum. Das Verfallsdatum steht vorab (Jahr - Monat, 2010-10) gefolgt von der Lotnummer (2010-10-AZ).

Lagerung und Haltbarkeit:

Um die Wirksamkeit des Produktes nicht zu beeinträchtigen, sollte es zwischen 15-30°C gelagert werden.

Tupfer: 3 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellungsdatum.

Spray: 3 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellungsdatum.

3M Medica

D-41453 Neuss, Germany

Hinweise zur Bestellung:

Kat.-Nr.	Größe	KP/GP (GP=Großpackg.)	Stck./KP (KP=Kartonpackg.)	CE Markierung
3343P	1,0 ml Tupfer	5	20	
3345P	3,0 ml Tupfer	5	20	
3346P	28 ml Sprayflasche	1	12 Flaschen	