



## Greifhilfe RFM Deluxe

### Gebrauchsanweisung



### Zweckbestimmung

Die Greifhilfe dient der Unterstützung des Patienten beim Aufheben, Festhalten und Greifen von kleineren Gegenständen

### Indikation

Geeignet für Personen, die in Ihrer Beweglichkeit und motorisch eingeschränkt sind. Für Personen mit geringer Greifkraft oder begrenzter Reichweite. Bei Krankheiten oder Behinderungen, die zu einer erheblichen Einschränkung des Aktionsradius der oberen Extremitäten und/oder einer Funktionseinschränkung der Rumpf- und Beinfunktionen geführt haben, so dass das Aufheben, Halten und Verschieben von Gegenständen ohne Hilfsmittel entweder nicht möglich oder weitgehend unmöglich ist. Ein Rest der Greiffunktion muss noch gegeben sein.

### Anwendung

Entnehmen Sie die Greifhilfe RFM Deluxe aus dem Karton und prüfen Sie diese auf Schäden. Nehmen Sie die Greifhilfe RFM Deluxe in die Hand und testen Sie die Hebel/Greif-Funktion, indem Sie den Griff mit den Fingern zusammen ziehen. Die Öffnung der Greifhilfe sollte sich hierbei schließen. Die Greifhilfe RFM Deluxe ist für den allgemeinen Einsatz bestimmt. Der Handgriff ist behinderungsgerecht gestaltet und leicht zu betätigen.

Mit dem Haken am vorderen oberen Ende der Greifhilfe können Sie leichte Gegenstände wie etwa ein Schlüsselbund oder eine Tüte aufheben. In der Spitze der Greifhilfe befindet sich ein Magnet. Dieser kann behilflich sein beim aufsammeln von Münzen, Nadeln, Büroklammern, einem Schlüssel o. Ä.

Der Kopf (die Zange) der Greifhilfe RFM Deluxe ist drehbar und kann je nach Anwendung in der Position verstellt werden, um einen Gegenstand besser greifen oder erreichen zu können. Somit können Schmerzen, die bei Drehungen des Handgelenks auftreten, vermieden werden.

### Sicherheitshinweise

1. Benutzen Sie die Greifhilfe RFM Deluxe nur für leichte Gegenstände!
2. Die Maximale Belastung ist 1 kg!

3. Achten Sie beim Zusammenziehen des Griffes darauf, dass Sie keine Kleidungsstücke oder Finger einklemmen!
4. Die Greifhilfe ist nicht zur Anwendung bei der Körperpflege und zur Zubereitung von Speisen geeignet.
5. Prüfen Sie die Funktion der Zange vor dem Gebrauch!
6. Benutzen Sie keine defekte Greifhilfe RFM Deluxe!

### Reinigung

Reinigen Sie die Greifhilfe RFM Deluxe regelmäßig mit einer milden Seifenlauge und einem feuchten Tuch. Trocknen Sie die Greifhilfe mit einem trockenen Lappen ab. Desinfizieren Sie die Greifhilfe RFM Deluxe regelmäßig z. B. mit Descosept AF. Die Greifhilfe ist für den täglichen Gebrauch gedacht. Die Benutzung kann durch mehrere Personen erfolgen. Bevor die Greifhilfe RFM Deluxe von einer weiteren Person genutzt wird oder in den Besitz einer anderen Person übergeht, muss dieses gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um der Übertragung von Keimen (Kontamination) vorzubeugen.

### Kontraindikation

Die Verwendung der Greifhilfe RFM ist ungeeignet bei Verlust der oberen Gliedmaßen, Lähmungen oder Wahrnehmungsstörungen.

### Lieferumfang

Greifhilfe RFM Deluxe – gebrauchsfertig  
Gebrauchsanweisung  
Umkarton

### Technisch Daten/ Maße und Gewicht

Material: Aluminium, Kunststoff (Polyethylen)  
Länge/Gewicht: 56 cm/285 g (Art. **09466272**), 76 cm/300 g (Art. **05374691**), 89 cm/320 g (Art. **05396735**)  
Belastbarkeit: ca. 1 kg

### Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



Daimlerstrasse 12 a  
D-25337 Elmshorn  
Tel.: (0)4121 4733 12  
Fax: (0)4121 4733 23  
[www.rehaforum.com](http://www.rehaforum.com)  
[info@rehaforum.com](mailto:info@rehaforum.com)