




Trikotbezüge

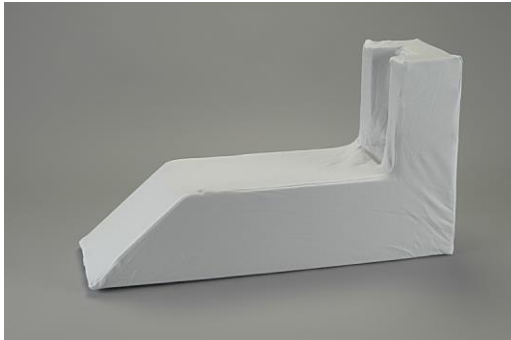

Art. 1534200 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1532100, 1532101 und 1532101
(Schaumstoffschiene nach Hartmann für Erwachsene, 70 x 25 cm)

Art. 1534300 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1532200, 1532201 und 1532201
(Schaumstoffschiene nach Hartmann für Erwachsene, 80 x 25 cm)

Art. 1534500 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1532300, 1532301 und 1532301
(Schaumstoffschiene für Erwachsene, 75 x 25 cm)

Art. 1534600 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1532700
(Schaumstoffschiene für Kinder, 55 x 23 cm)

Art. 1534700 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1532800, 1532801
(Schaumstoffschiene für Erwachsene mit Kunststoffsohle, 75 x 30 cm)

Art. 1534800 Trikotbezug, passend zu Beinschiene Art. 1533100, 1533101
(Schaumstoffhochlagerungsschiene nach Braun für Erwachsene, 75 cm)

Art. 1533802 Trikotbezug Gr. 1, passend zu Beinschiene Art. 1533800, 1533806 und 1533808
(Schaumstoffhochlagerungsschiene nach Schulze Gr. 1 für Erwachsene, 75 x 25 cm)

Art. 1533803 Trikotbezug Gr. 2, passend zu Beinschiene Art. 1533801 und 1533807
(Schaumstoffhochlagerungsschiene nach Schulze Gr. 2 für Kinder, 55 x 20 cm)

Art. 1533903 Trikotbezug passend zu Beinschiene Art. 1533900 und 1533901
(Schaumstoffhochlagerungsschiene für Erwachsene, 77 x 25 x 25 cm, Ausschnittsmaße: 58 x 14-17 x 10 cm)

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung:

Die Trikotbezüge dienen dem Schutz der Beinschiene.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die auf diesem Datenblatt genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung kann unerkannte Gefahren in sich bergen und ist zu unterlassen.
- Das Produkt ist regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.

3. Materialbeschaffenheit, Reinigung und Desinfektion:

Material:

100 % Baumwolle, geprüft nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse II (Produkte mit Hautkontakt)



Prüf-Nr. 96.0.0871 FI Hohenstein

Die feine Baumwollfaser ist weich und durch ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen, besonders hautverträglich. Sie besitzt eine hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und verfügt über gute Pflegeeigenschaften.

Die Zugfestigkeit betreffend, besitzt Baumwolle eine Feinheitsfestigkeit von 1,5-5,0 cN/dTEX, welche als hoch eingestuft wird. Die feinheitsbezogene Nassfestigkeit wird in Prozent der Feinheitsfestigkeit angegeben und beträgt 100-110 %. Diese Werte sind mit „hoch“ eingestuft.

In Bezug auf das Brennverhalten gehört Baumwolle zu den leichter entflammaren Faserstoffen (Pyrolysebereich: 250-270°C, Fremdzündungstemperatur: 350 °C, Selbstzündungstemperatur: 400 °C)

Reinigung und Desinfektion:

Die weißen Bezüge können bei 60°C mit gleichen Farben in der Maschine gewaschen werden. Farbige Bezüge können bei 40 °C mit ähnlichen Farben in der Maschine gewaschen werden. Die Trikotbezüge sollten nicht maschinell getrocknet werden, um die Form zu erhalten.

Durch Beigabe von geeigneten Waschdesinfektionsmitteln wie z.B. Sagrotan Wäsche Hygienespüler wird eine Desinfektion bei Waschttemperaturen im Bereich von kalt - 60°C erzielt.

Wenn die weißen Bezüge bei 95°C gewaschen werden, muss beachtet werden, dass bei höherer Waschttemperaturen auch der Waschschrumpf analog steigt.

Ebenso wirkt sich eine Tumbler Trocknung mit reduzierter thermischer Belastung schrumpferhöhend aus. Bügeln ist bis zu 3 Punkten (Baumwolle, Leinen) möglich.

4. **Wartung:**

Das Produkt sollte vor jeder Anwendung auf Unversehrtheit des Materials (Baumwollstoff und Reißverschluß) kontrolliert werden. Bei Schäden an der Oberfläche ist es zu ersetzen.

5.1 **Umgebungsbedingungen:**

Für Transport und Lagerzeiten bis 3 Monate gelten folgende Lagerbedingungen:

Das Produkt sollte sehr trocken bei Raumtemperatur gelagert werden.
Große Hitzeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Beim Gebrauch ist die Umgebungstemperatur von 10°C bis 40°C einzuhalten.



Dr. Paul Koch GmbH
Im Geiselrain 7
D-72636 Frickenhausen
Germany

Phone +49 (0) 7022 / 40595 – 0
Fax +49 (0) 7022 / 40595 – 55

www.dr-koch.de
www.dr-koch-webshop.de