

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11516

### MEDI-INN Urinflaschen für Frauen PP, durchscheinend

#### Beschreibung

Die Urinflasche dient dem Auffangen von Urin bei bettlägerigen Patienten oder vorübergehend immobilen Personen.

#### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der VO 2017/745 geeignet für Arbeiten im medizinisch / pflegerischen, sowie in privaten Bereichen.

#### Produktinformationen

<b>Aufnahmekapazität</b>	1000 ml		
<b>Farbe Flasche</b>	durchscheinend		
<b>Farbe Deckel</b>	Blau		
<b>Abmessungen in cm</b>			
<b>Flasche</b>	Länge: 26,5	Ø Flaschenhals (oval): 8,3 x 4,7	Boden: 14,8 x 6,8
<b>Deckel (oval)</b>	Ø: 9,5 x 6,0		
<b>Material</b>			
<b>Flasche</b>	Polypropylen (PP)		
<b>Deckel</b>	Polypropylen (PP)		

#### Verpackung/ Lagerung

<b>Art.- Nr.</b>	N11516
<b>Mengeneinheit</b>	Stück
<b>Menge in der Einzelverpackung</b>	1
<b>Menge der Einzelverpackungen im Karton</b>	48
<b>Art der Einzelverpackung</b>	Polybeutel
<b>Kartonmaße</b>	60 x 28 x 62 cm
<b>Haltbarkeit</b>	Die Urinflasche kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder die Urinflasche verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung der Urinflasche nicht mehr gewährleistet werden kann.
<b>Kennzeichnung</b>	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum
<b>Entsorgungshinweise:</b>	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
<b>Lagerung</b>	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Hinweise zur Aufbereitung

<b>Thermische Desinfektion</b>	Setzen Sie die Urinflasche samt Inhalt in ein geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Die Urinflasche nicht vorher manuell entleeren. Falls der Deckel der Urinflasche geschlossen sein sollte, diesen wieder öffnen. Starten Sie eine geeignete Programmwahl des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Nach dem Reinigungsvorgang die gereinigte und desinfizierte Urinflasche entnehmen.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Die Dauer des Reinigungsprogrammes ist unter Beachtung von den Herstellerangaben des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes abhängig und richtet sich ebenso auf die empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus.

## Qualitätssicherung

<b>Produktbezogene Normen</b>	EN 1041 ISO 10993-1 ISO 10993-5 ISO 10993-10 EN ISO 15223-1
<b>Qualitätszertifikate</b>	EN ISO 13485:2016 EN ISO 9001-2015

## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Urinflaschen kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Urinflaschen auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Urinflaschen nicht verwenden!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3  
D-50226 Frechen, Germany

**Ort, Datum** Frechen, 14.03.2022