


Pos. Nr.	Dokumentnummer	Titel	Material	Menge
1	WAP-IMP 001/1--30	Halterung WAW R/L		1
2	WASP-IMP-001/2--30	Halterung Kopfseite		1
3	WASP-IMP-001/5--30	Anschlg verstellbar Kopf	Stahl 20x20x2mm	1
5	WAP-IMP 001/10--30	Zwischenstück	Profiltröhr 30x20x2	1
6	E10199902000	Blindnietmutter M6x9x15,5	Stahl, galvanisiert	2
7	E10199907021	RAMPA-Flachkopschr. M6x25	Nickel	2
8	E10112504000	Scheibe DIN 125 - B 4,3	Stah_gal, Zn	6
9	E10500101000	Rastbolzen GN608-6-6		3
10	E10273825000	Linsenkopschr._ISO 7380 M4x6mm	St_verzinkt	6
11	E10199903000	Blindnietmutter M8x11x17	Stahl, galvanisiert	2
12	E22100103000	WAW Rolle h 75/15,5_ RAL 7038		2
13	E20200133000	Distanzscheibe-KU_DS 15,5/8,4/20	Kunststoff	2
14	E10290201000	Scheibe DIN 9021 - 8,4	Stahl	2
15	E10273807000	Linsenkopschr._ISO 7380 M8x35mm	St_verzinkt	2
16	E20100102005	Lamellenstopfen 20x20x0,8-3 /grau		2
17	E20100104005	Lamellenstopfen 30x20x1-3 /grau	Kunststoff	2
18	WASP-IMP-001/6--30	Anschlag verstellbar R/L	Stahl 20x20x2mm	1

Allgemeintoleranz DIN / ISO 2768-m-5		Werkstück -Kanten DIN 6784	Maßstab: <b>M 1:25</b>	Zeichnungsstatus: 01
WAP-Kopf-IMP400-Vormontage			Werkstoff:	(Gewicht) 0,000 kg
	Datum 17.02.2016	Name Arnold	(Benennung) Vormontage	
	Bearb. gepr. Norm		Wandabweispuffer IMP 400 Kopf	
Betten Malsch GmbH Rohbergstraße 9 36208 Wildeck			(Zeichnungsnummer) <b>E7990010200</b>	Blatt 1 2 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Ers.f.)

# Vormontage Einzelkomponenten

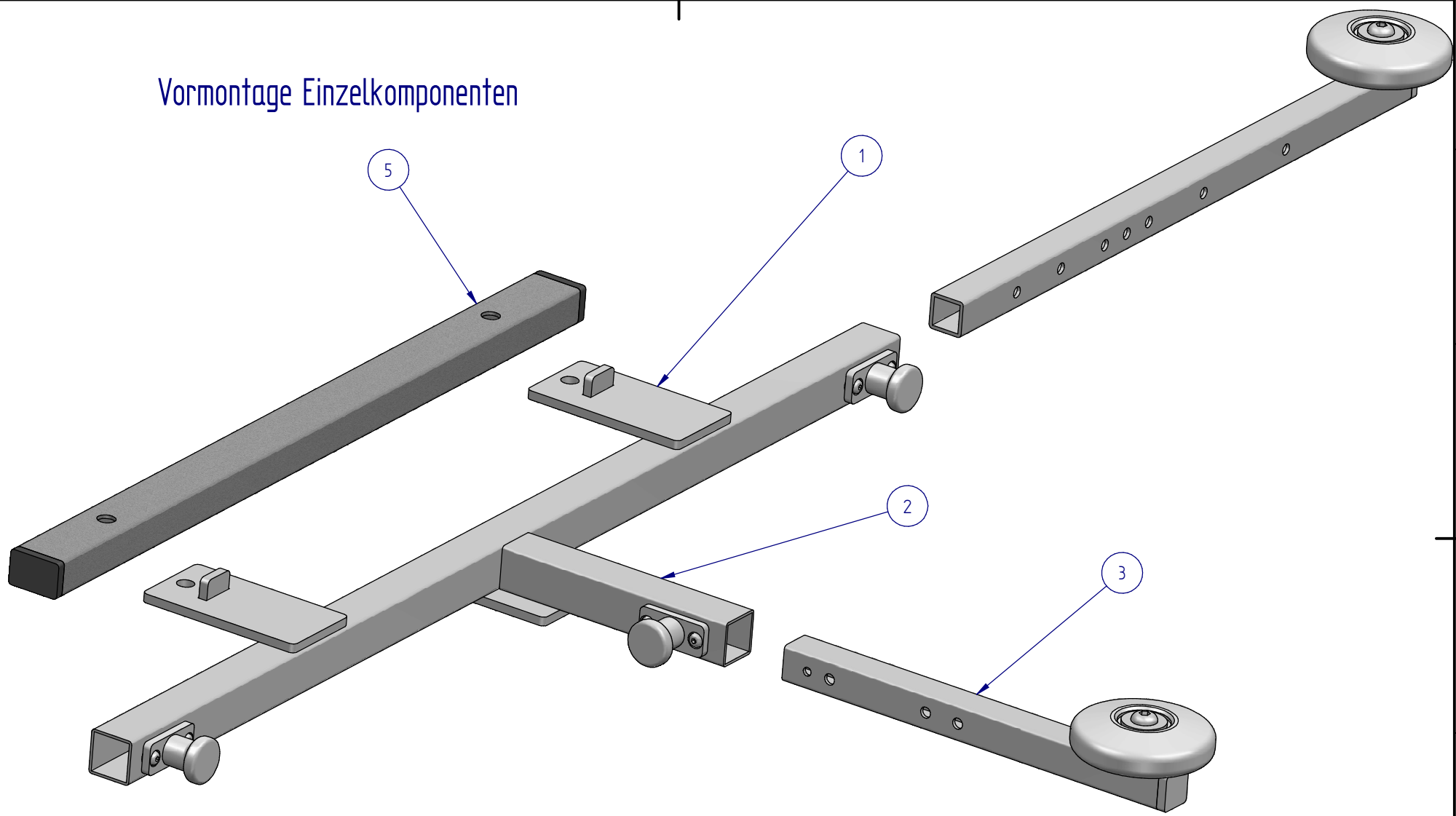

unbemalte Werkstückkanten gratfrei nach DIN 6784

Dateiname des Zeichnungsobjekt WAP-Kopf-IMP400-Vormontage		Allgemeintoleranz DIN / ISO 2768-m-S	Werkstück -Kanten DIN 6784	Maßstab: M 1:2	Zeichnungsstatus: 01	
			Werkstoff:	Größe:	(Gewicht): 0,000 kg	
		Datum	Name	(Projekt)		
		Bearb.	17.02.2016	Vormontage		
		Gepr.	Arnold	(Benennung)		
		Norm		Wandabweispuffer IMP 400 Kopf		
				(Zeichnungsnummer)		Blatt
				Betten Malsch GmbH Rohbergstraße 9 36208 Wildeck		2
				E7990010200		2
Zust.	Anderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.)	(Ers.d.)