



- Home
- Marken
- Produkte
- Ernährung

- Medikamente
- Gesundheit
- Pflege + Kosmetik
- Haushalt + Freizeit
- Mein Konto
- Business-Bereich
- CHF 0.00

STOP HÉMO BLUTSTILLENDE WATTE, 5 STÜCK



stop
hémo

Bei Nasenbluten, Blutungen der Haut und des Mundes.
Wie benutzt man Stop Héro bei Nasenbluten?

Erhältlich in Apotheken & Drogerien.

Bei Nasenbluten, Blutungen der Haut und des Mundes.
Wie benutzt man Stop Héro bei Nasenbluten?

1. Ruhe bewahren,
2. Den Kopf nach vorne neigen und sich die Nase richtig schnäuzen, um mögliche Blutklumpen zu entfernen,
3. Stop Héro Watte Beutel öffnen und die Watte der Länge nach zu einem dichten Stift zusammen rollen. Die Watte kann mit einem physiologischen Serum imprägniert werden, um die Einführung ins Nasenloch zu vereinfachen,
4. Stop Héro Watte einführen, dann die beiden Nasenlöcher während 10 Minuten aneinander drücken und ruhig bleiben,
5. Dann die Watte während 20 bis 30 Minuten in der Nase lassen, bevor sie vorsichtig rausgenommen wird. Den Beutel benutzen, um die Watte fortzuwerfen,
6. Sollte die Watte zu lange in der Nase verweilt haben, einfach mit physiologischem Serum befeuchten um das Rausziehen zu vereinfachen.

5 individuelle, gebrauchsfertige und blutstillende Wattestücke aus Kalziumalginat, einzeln verpackt.

Erhältlich in Apotheken & Drogerien.

Menge

In den Warenkorb

CHF 9.90

Art.-Nr.: 4850 Kategorie: Gesundheit Brand: Stop Héro

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren :



Solvarome – Ätherische Öle

Weitere Produktinformationen

Weitere Produkte der Marke Solvarome.



Epitact Pharma Flexible Korrekturbandage Hallux Valgus TAG

Weitere Produktinformationen

Weitere Produkte der Marke Epitact Pharma.



Epitact Pharma PHYSIOstrap Junior

Weitere Produktinformationen

Weitere Produkte der Marke Epitact Pharma.



Epitact Pharma Separatoren

Weitere Produktinformationen

Weitere Produkte der Marke Epitact Pharma.

PRODUKT-BEREICH

Unsere Leader
Neu
Kategorien

Struktur
Kompetenzen
Geschichte

Kontakt
BUSINESS-BEREICH

Stellenangebote
Kontakt

30.6.2020

Blutstillende Watte, 5 Stück | e-Shop Stop Héro in der Schweiz

Uhlmann Eyraud S.A.
Atelièrgasse 1
5600 Lenzburg

Tel. +41 58 272 54 00
info@uhlmann.ch
www.uhlmann.ch

Copyright © 2014 - All Rights Reserved - F. UHLMANN-EYRAUD S.A.
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Kontakt [site web](#)