

Handmanschette mit Metallring



Verhindert den Druck auf die Handgelenke. Verhindert Hautverletzungen durch Mazeration und Abrieb. Die äußere Beschichtung von weichen *velour* ermöglicht das Verstellen des Verschlusses durch selbstklebenden Textilverschluss einfach und schnell. Innengewebe aus hypoallergenem Material. Atmungsaktiv. Einfach

Versión normal

Salvacel

Videos Salvacel

salvacel



Fast and quick releas...



Wiederverwendbar



Sämtliche SALVACEL-Produkte können mit warmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und wiederverwendet werden.

Salvacel-Katalog

ENG-ESP [PDF]

verwendet werden, um die Handgelenke oder die Knöchel zu fixieren, inklusive Sicherheitsring.



Anwendung

1. Legen Sie die Befestigung mit dem Ring nach außen um das Handgelenk. Befestigen und fixieren mit dem selbstklebenden Textilverschluss.
2. Führen Sie das Befestigungsband durch den Ring und befestigen Sie es mit einer doppelten Schlaufe.
3. Binden Sie es an den Bettrahmen. Sie bekommen so eine starke, bequeme und sichere Fixierung.

Weitere Informationen

Referenzen:	Code	Größe	
	SVC2476	M	
	SVC2476XL	L	
	SVC2476XL2	L	Mit 2 Streifen

Verpackungsgröße: 24 Stück Packung

Anwendungen: Leichtes Bett

Publiziert in **Salvacel**

Schlagwörter *Heimpflege-Service Tageszentrum Geschäfte mit technischen Hilfsmittel Geriatrie Pädiatrie Operationssaal Wohnheim für unheilbar Kranke UCI Gynäkologie Radiologie Neurologie Spital*

« Handmanschette mit Nylonring
Handmanschette mit Textiling »

