



Toilettenstuhl RFM feststehend, Art. 03633016

⚠️ Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung bevor Sie den Toilettenstuhl RFM feststehend montieren, einstellen oder erstmalig in Gebrauch nehmen.

Zweckbestimmung

Der Toilettenstuhl RFM feststehend dient der Unterstützung von Personen, die in Ihrer Beweglichkeit und Mobilität eingeschränkt sind und denen das Erreichen der Toilette Schwierigkeiten bereitet.

Indikation

Der Toilettenstuhl kann angewendet werden bei Personen mit

- Leichten Gleichgewichtsstörungen
- Funktionsausfällen der unteren Extremitäten
- Lähmungszuständen
- Mit fehlender Rumpfkontrolle
- Eingeschränkter Beweglichkeit der Hüft- und Kniegelenke

Kontraindikation

Die Verwendung des Toilettenstuhls ist nicht angezeigt bei Personen mit

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Personen mit Amputationen der Arme

Montage/Anleitung:

1. Der Toilettenstuhl wird montiert in einem Karton geliefert: Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Die Stuhlbeine sind höhenverstellbar.
2. Um die Höhe einzustellen, ziehen Sie den Clip aus der Bohrung und bringen die Teleskopstangen in die gewünschte Höhe. Danach stecken Sie den Clip wieder zurück in die Bohrung, damit die Teleskopstange fixiert wird. Verfahren Sie mit allen vier Beinen in der beschriebenen Reihenfolge und achten Sie darauf, dass die Beine in der gleichen Höhe eingestellt sind.
3. Setzen Sie den Eimer von oben in die Haltevorrichtung. Prüfen Sie den festen Sitz des Eimers.



4. Der Toilettenstuhl ist für die Nutzung im Innenbereich gedacht und sollte nicht in die Dusche oder Badewanne gestellt werden.

5. Zur Benutzung des Toilettenstuhls nehmen Sie die Sitzabdeckung ab und den Deckel des darunter befindlichen Eimers. Stützen Sie sich an den Armlehnen und setzen Sie sich auf den Stuhl bzw. die Toilettenbrille. Die Rückenlehne ermöglicht ein leichteres Sitzen. Die Armlehnen erleichtern das Aufstehen und der Stuhl kann nach der Benutzung und Reinigung wieder mit der Sitzfläche abgedeckt und als Stuhl genutzt werden.

6. Der Stuhl kann über WC-Becken genutzt werden und die Toilettenbrille ist abnehmbar. Nachdem der Deckel abgenommen wurde kann die Toilettenbrille hochgeklappt und vom Rahmen genommen werden. Die Klemmen werden hierfür vorsichtig vom Gestell nach oben gedrückt. Unter der Brille befindet sich der Eimer, der in einer Halterung unter dem Stuhl befestigt ist und in diese eingesetzt werden kann. Zur Nutzung über dem WC kann die Brille auf dem Stuhl bleiben. Der Eimer wird aus der Halterung gehoben. Zur Reinigung können beide Elemente wie beschrieben vom Rahmen bzw. aus der Halterung entfernt werden und danach wieder eingesetzt bzw. aufgesetzt werden. Die Kunststoffklemmen der Brille vermeiden ein Wegrutschen auf dem Rahmen.



Sicherheitsanweisung ⚠

1. Achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass der Toilettenstuhl einen festen geraden Stand hat.
2. Achten Sie darauf, dass alle vier Stuhlbeine gleich hoch eingestellt sind.
3. Achtung: Bei Herunterklappen der Sitzfläche besteht Klemmgefahr!
4. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Schrauben fest sitzen!
5. Verwenden Sie keinen defekten Toilettenstuhl!
6. Beschädigte oder abgenutzte Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ausgetauscht werden.

7. Achtung: Bei Aufstützen auf nur eine Seite oder Armlehne oder einseitiger Belastung besteht Kippgefahr!

Reinigung

Sie sollten den Toilettenstuhl, der zur Wiederverwendung bestimmt ist, in regelmäßigen Abständen reinigen bzw. desinfizieren. Das ist bei der Nutzung und des Wiedereinsatzes durch einen anderen Patienten zwingend erforderlich! Verwenden Sie eine handelsübliche milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die abnehmbare Sitzbrille kann unter fließendem Wasser abgespült und anschließend desinfiziert werden. Mit dem Eimer sollte ebenfalls so verfahren werden. Die Desinfektion des gesamten Stuhls kann mit handelsüblichen Mitteln gem. Herstellerangaben durchgeführt werden, z. B. mit RFM Sept.

Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Hochdruck- und Dampfreiniger!

Wartung

Der Toilettenstuhl RFM feststehend ist wartungsfrei. Alle gepolsterten Flächen und der Eimer bestehen aus pflegeleichtem PVC, welches wasserabweisend ist. Das Gestell ist aus lackiertem Aluminium gefertigt und somit nicht anfällig für Korrosion.

Funktionsfehler: 

Wenn Sie Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen sowie lose montierte Teile feststellen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Lieferumfang

Toilettenstuhl

4x höhenverstellbare Beine

Toiletteneimer mit Deckel

Sitzfläche und Abdeckung

Gebrauchsanweisung

Technische Daten/Maße und Gewicht

Gewicht: 8,3 kg

Sitzhöhe: 51 – 56 cm

Sitzbreite: 41 - 45 cm

Sitztiefe: 41,5 cm

Gesamthöhe: 86-100 cm

Breite der Rückenlehne: 41 cm

Max. Breite zwischen den Armlehnen: 47 cm

Gesamtbreite: 53,5 cm

Polsterung der Rückenlehne: 28 mm

Polsterung der Armlehnen: 30 mm


Maximale Belastung: 130 kg

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.



Daimlerstrasse 12 a
D-25337 Elmshorn
Tel.: (0)4121 4733 12
Fax: (0)4121 4733 23
www.rehaforum.com
info@rehaforum.com
Rev. 07/2016

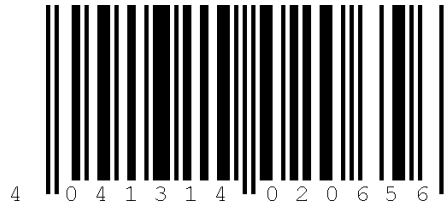

HMV-Nr. 33.40.04.0026
PZN (Pharmazentralnummer 11878906)