




Calligator

Spezialklarspülmittel zum Einsatz in DISCHER Steckbeckenspülem
Flüssigkonzentrat



Hauptanwendungsbereich:	Gegen Kalkausfällung in Dampferzeugern von Steckbeckenspülem
Eigenschaften:	<p>Calligator ist ein leicht sauer eingestellter Klarspüler mit speziellen Komponenten zur wirksamen Wasserhärte-Abbindung. Durch das gute Kalkbindevermögen und die hervorragende Benetzung wird das Spülgut fleckenfrei und ohne Kalkablagerungen klargespült.</p> <p>Bei bestimmungsgemäßem Einsatz entstehen keine Kalkansätze im Dampferzeuger oder in den Rohrleitungen.</p> <p>Calligator ist bei allen Wasserhärten einsetzbar.</p>
Anwendung und Dosierung:	<p>Calligator wird in DISCHER Steckbeckenspüler eingesetzt. Dosierung: 0,5 – 1,5 ml/l, je nach Wasserhärte über eingebaute Dosiergeräte. Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten. Dies wurde für DISCHER Steckbeckenspüler geprüft und bestätigt.</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen.</p> <p>Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.</p> <p>Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.</p> <p>Bitte beachten Sie die Aufbereitungsinformationen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.</p> <p>Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.</p> <p>Nur für gewerbliche Anwendungen.</p>
Technische Daten:	<p>Dichte (20 °C): ca. 1,1 g/cm³ pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: 3,4 – 3,1 Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas</p>
Inhaltsstoffe:	<p>Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004: < 5 % Polycarboxylate, außerdem: Konservierungsmittel (Methylchloroisoithiazolinone / Methylisothiazolinone)</p>
CE-Kennzeichnung:	<p>  Calligator erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.</p> <p>Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.</p>
Lagerhinweise:	<p>Frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .</p>
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	<p>Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>
Vertrieb:	<p>Der Vertrieb erfolgt durch: DISCHER Technik GmbH, Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten, Deutschland, Tel: +49 (0) 2104 2336-0, info@discher.de, www.discher.de</p> <p>Importeur in der Schweiz: Morath AG, Paradiesrain 6, CH-4123 Allschwil</p>

Calligator

Spezialklarspülmittel zum Einsatz in DISCHER Steckbeckenspülem
Flüssigkonzentrat



Herstellung:



Hergestellt von: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85,
20539 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49 (0)40 7 89 60-0

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Stand 11/2021