




## Luftkissen-Set RFM

### Gebrauchsanweisung

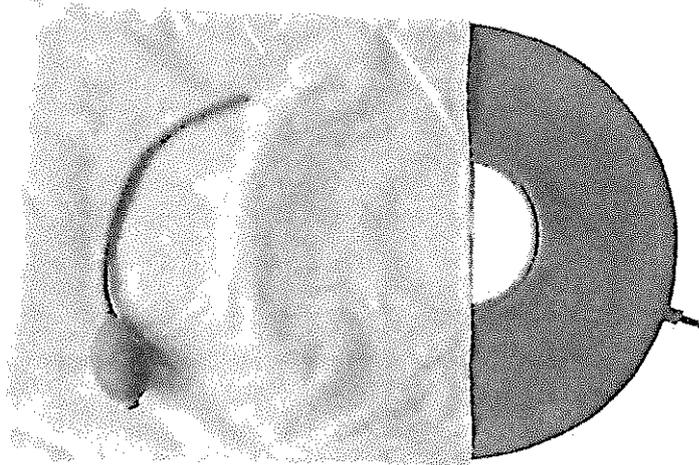

DE 

Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung, bevor Sie das Luftkissen-Set RFM erstmalig in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, so dass sie für die spätere Verwendung zur Verfügung steht.

#### Zweckbestimmung

Das Luftkissen-Set RFM ist für den häuslichen Gebrauch vorgesehen zur kurzfristigen druckentlastenden Lagerung von Personen, die in Ihrer Beweglichkeit im Liegen eingeschränkt sind. Zur Vermeidung von Verletzungen beim Sitzen und zur Linderung von Schmerzen während des Liegens oder Sitzens in einer Position. Aufgrund der Druckverteilung besteht insbesondere beim längeren Sitzen die Gefahr einer Schwellung im Gewebe des Körpers.

#### Indikation

Ermöglicht eine angenehme und angepasste Lagerung während des Liegens, im Gesäß- und Oberschenkelbereich. Zur kurzzeitigen Entlastung des Sakralbereiches nach z.B. OP am bzw. im Anal-/Vaginalbereich oder nach der Geburt.

#### Anleitung

1. Entnehmen Sie das Luftkissen der Polybeutel-Verpackung und überprüfen Sie dieses auf Schäden.
2. Öffnen Sie das Luftventil durch eine Umdrehung und setzen Sie die Pumpe mit dem Schlauch auf das Ventil.
3. Durch das Drücken des Blasebalgs pumpen Sie Luft in das Kissen. Achten Sie dabei auf die Füllmenge und die Elastizität des Kissens. Dieses sollte nicht zu fest aufgepumpt sein, um

eine angenehme Lagerung zu ermöglichen. Das Kissen ist richtig befüllt, wenn der zu entlastende Bereich freigelagert und die Lagerung für die zu lagernde Person angenehm ist.

4. Schließen Sie nach dem Aufpumpen das Ventil, schieben Sie das Kissen ohne Bezug unter das Gesäß der zu lagernden Person. Achten Sie darauf, dass das Ventil zwischen den Oberschenkeln des Patienten liegt, um Druckstellen und Verletzungen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob das Kissen richtig befüllt ist.
5. Falls erforderlich, passen Sie die Füllmenge an, indem Sie das Kissen vorsichtig unter dem Patienten hervorziehen und Luft aus dem Kissen ablassen oder nachpumpen. Prüfen Sie die Füllmenge erneut und wiederholen Sie die beschriebenen Anpassungsschritte bis das Kissen richtig befüllt ist.
6. Schließen Sie das Ventil und ziehen Sie den Einmal-Bezug vorsichtig über das Kissen.
7. Schieben Sie das Kissen unter das Gesäß der zu lagernden Person.
8. Wegen der schlechten Belüftung innerhalb des Luftkissens sollte das Produkt kurzzeitig eingesetzt werden.

### **Sicherheitsanweisung**

1. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Luftkissen Luft verliert und achten Sie darauf, dass das Ventil verschlossen ist.
2. Prüfen Sie das Luftkissen auf poröse Stellen oder Schäden an den Innen- und Außennähten.
3. Benutzen Sie kein defektes Luftkissen und achten Sie auf die maximale Belastbarkeit von 100 kg! Das Luftkissen sollte sich der Kontur des Körpers anpassen und darf demnach nicht zu hart aufgepumpt sein. Je nach Gewicht des Patienten ist das Befüllen des Luftkissens individuell zu regulieren.
4. Schützen Sie das Luftkissen vor direktem Sonnenlicht und direkter Heizwärme.
5. Achten Sie darauf, dass das Luftkissen nicht mit spitzen Gegenständen in Kontakt kommt.
6. Sollten Sie Risse im Bezug bemerken, tauschen Sie diesen bitte sofort aus.

### **Reinigung**

Reinigen Sie das Luftkissen-Set RFM mit einer Lösung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und trocknen Sie dieses mit einem Tuch ab. Achten Sie darauf, alle Oberflächen des Produktes gründlich zu säubern. Vermeiden Sie den Kontakt mit Fetten, Ölen und Körperlotionen und entfernen Sie diese sofort gründlich. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Der Einmal-Bezug kann vorsichtig mit der Hand gewaschen werden.

### **Desinfektion**

Das Kissen ohne Bezug kann bei Bedarf durch eine Wischdesinfektion desinfiziert werden. Verwenden Sie hierfür ein handelsübliches VAH- oder RKI-gelistetes Desinfektionsmittel, wie z. B. Bacillol AF, das für Gummi geeignet ist, s. [www.vah-online.de/](http://www.vah-online.de/) oder [www.rki.de](http://www.rki.de). Reinigen Sie zunächst das Kissen, wie im Abschnitt Reinigung beschrieben ist. Wischen Sie anschließend alle Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch ab, so dass das Produkt gleichmäßig mit Desinfektionsmittel benetzt ist. Spülen Sie das Desinfektionsmittel nicht nach und lassen Sie das Produkt an der Luft trocknen. Beachten Sie bei der Anwendung die Sicherheits- und Anwendungshinweise der jeweiligen Desinfektionsmittelhersteller. Nach jeder Desinfektion ist ein neuer Bezug zu verwenden.

### **Mehrfach-Gebrauch**

Das Luftkissen-Set RFM ist für den täglichen oder regelmäßigen Gebrauch gedacht. Die Benutzung kann durch mehrere Personen erfolgen. Bevor das Luftkissen-Set RFM von einer weiteren Person genutzt wird oder in den Besitz einer anderen Person übergeht, muss dieses gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um der Übertragung von Keimen (Kontamination) vorzubeugen. Hierfür sollte wie unter dem Punkt Desinfektion beschrieben vorgegangen werden.

### Lagerung

Bewahren Sie das Luftkissen an einem trockenen und lichtgeschützten Ort auf. Lassen Sie das Luftkissen nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es lagern.

### Wartung

Das Luftkissen-Set ist wartungsfrei. Sollten Sie Schäden oder Veränderungen am Material feststellen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

### Kontraindikation

Die Verwendung des Luftkissens ist ungeeignet bei Verletzungen im Gesäß- und Oberschenkelbereich.

### Lieferumfang

Luftkissen mit Einmalbezug  
Pumpe mit Schlauch  
Gebrauchsanweisung

### Maße und Gewicht

Durchmesser außen (entleert): 42,5 cm/ 45 cm  
Durchmesser innen (entleert): 14 cm  
Durchmesser außen (gefüllt): 41 cm/ 44 cm  
Durchmesser innen (gefüllt): 15,5 cm  
Gewicht: 500 g  
Max. Belastbarkeit: 100 kg  
Material Luftkissen: Gummi  
Material Bezug: Faservlies-Stoff

### Meldung/Vorkommnis


Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



Art. 12472187 (42,5 cm)



Art. 13099483 (45 cm)

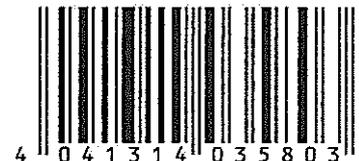

Daimlerstrasse 12 a  
25337 Elmshorn  
Tel.: (0)4121 4733 12  
Fax: (0)4121 4733 23  
www.rehaforum.com  
info@rehaforum.com

HMV: 20.39.01.0024

## LUFTKISSEN-SET RFM® Hi.Mi.-Nr. 20.39.01.0024

Dient zur druckentlastenden Lagerung von Personen, die in Ihrer Beweglichkeit im Liegen eingeschränkt sind. Zur Vermeidung von Verletzungen bei längerem Liegen und zur Linderung von Schmerzen während des langen Liegens in einer Position. Es ermöglicht eine angenehme und angepasste Lagerung, im Gesäß- und Oberschenkelbereich. Zudem bietet unser Luftkissen RFM® die Möglichkeit einer Dekubitus-Prophylaxe. Sowohl für Personen geeignet, die z. B. nach einer Operation über einen längeren Zeitraum liegen müssen.

**Gewicht** 500 g

**Durchmesser entleert**

**außen** 42,5 / 45 cm | **innen** 14 cm

**Durchmesser gefüllt**

**außen** 41 / 44 cm | **innen** 15,5 cm

**Max. Belastbarkeit** bis 100 kg

**Material Bezug** Faservlies-Stoff

**Material Luftkissen** Gummi



### Artikelnummer

### Maße

12472187

42,5 cm, inkl. Pumpe

13099483

45 cm, inkl. Pumpe

### Ersatzteile | Zubehör

ET000276

Ersatzbezüge (10 Stück)