

419827A

UrgoTul® Foam



DS LIPIDOKOLLOID-SCHAUMSTOFFWUNDAUFLAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTul Foam ist eine absorbierende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver TLC-Matrix, einer innovativen Technologie, die von Laboratoires Urgo entwickelt wurde. Die mikroadhäsive Lipidokolloid-Technologie (TLC) besteht in der Beschichtung einer Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit einer mikroadhäsiven Lipidokolloid-Matrix. Diese erleichtert das Anlegen, die Positionierung und das atraumatische (gewebefreundliche) Ablösen der Wundauflage.

UrgoTul Foam besteht aus:

- einer mikroadhäsiven TLC-Matrix in Kontakt mit der Wunde, die auf eine absorbierende Schaumstoffkomresse aus Polyurethan aufgebracht ist und
- einem elastischen Vliesstoffträger aus Polyurethan.

EIGENSCHAFTEN

• Die Hydrokolloidpartikel der mikroadhäsiven TLC-Matrix nehmen in Kontakt mit dem Wundexsudat eine gelartige Konsistenz an und bilden einen Lipidokolloidfilm an der Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen physiologischen Milieus
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde
- Atraumatisches Ablösen der Wundauflage ohne Schädigung der neu gebildeten Gewebestrukturen
- Schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten
- Schutz der periläsionellen Haut (Wundumgebung)
- Die absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse gewährleistet eine optimale Drainage der Exsudate und schützt so die periläsionelle Haut vor Mazerationen.
- Das Trägermaterial ist weich, anpassungsfähig und sehr komfortabel. Es sorgt für eine gute Anpassung der Wundauflage an das anatomische Relief der Wunde.
- Die mikroadhäsive Wundauflage erleichtert die pflegerischen Maßnahmen in Bezug auf die Durchführung und Überwachung der Behandlung.

INDIKATIONEN / ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTul Foam ist für die Behandlung aller exsudierenden chronischen Wunden (z.B. Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre, Diabetische Fußulzera) und akuten Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) sowie zur lokalen Akutbehandlung von tumorinduzierten Wunden in Verbindung mit ihrer spezifischen Therapie geeignet.

Die Fersenform (**UrgoTul Foam Heel**) ist für die Behandlung exsudierender Wunden im Fersenbereich geeignet: chronische Wunden (z.B. Fersendekubitus) und akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden).

Da **UrgoTul Foam** und **UrgoTul Foam Heel** keinen mit einer Klebmasse beschichteten Haftrand besitzen, sind diese Wundauflagen für die Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

UrgoTul Foam

• Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und anschließend mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Die Wundumgebung sorgfältig trocknen.

UrgoTul Foam kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

• Anlegen der Wundauflage:

- Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite abziehen.
- Die mikroadhäsive Seite von **UrgoTul Foam** direkt auf die Wunde auflegen.
- Die Wundauflage mit einem Sekundärverband (z.B. Urgomull haft latexfrei) fixieren. Die Wundauflage kann je nach ärztlicher Verordnung auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) verwendet werden.

UrgoTul Foam Heel

• Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und anschließend mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Die Wundumgebung sorgfältig trocknen.

UrgoTul Foam Heel kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

• Anlegen der Fersenform:

- Die Wundauflage **UrgoTul Foam Heel** hat die Form eines Pfeils. Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite abziehen, den Pfeil in Richtung der Fußspitze (Zehen) anlegen und dabei die mikroadhäsive Seite von **UrgoTul Foam Heel** direkt auf die Wunde auflegen. Die Wundauflage so positionieren, dass sich die Ferse auf der beschichteten, mikroadhäsiven Seite der Wundauflage (Einkerbung) befindet.

- Den hinteren Abschnitt des Pfeils auf der Höhe der Achillessehne anmodellieren. Die Wundauflage zu beiden Seiten des Fußes gut fixieren.

- Die Wundauflage mit einem Sekundärverband (z.B. Urgomull haft latexfrei) fixieren.

• Verbandwechsel:

UrgoTul Foam und **UrgoTul Foam Heel** sollten alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden und können, in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde, bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Ist diese beschädigt, ist die Sterilität nicht mehr gewährleistet und die betroffene Wundauflage darf nicht mehr verwendet werden.

- Die mikroadhäsive TLC-Matrix von **UrgoTul Foam** haftet an chirurgischen Latexhandschuhen. Es wird daher empfohlen, jeglichen Kontakt mit der beschichteten, mikroadhäsiven Seite zu vermeiden oder für das Auflegen des Verbandes sterile Pinzetten zu verwenden.

- Die gleichzeitige Anwendung einer Creme, einer Salbe oder einer Emulsion wird nicht empfohlen.

- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Einschätzung durch den behandelnden Arzt auf eine antibakterielle Wundauflage, wie z.B. UrgoCell Silver, umgestellt werden.

- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.

- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 16, 66280 Sulzbach

CE 0459

Date of issue : 2008



Latest revision : 2014 - 03

STERILE R



www.urgo.de

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENOVE - France

CETTE ÉPREUVE COULEUR EST UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LE POSITIONNEMENT DU TEXTE, CODE À BARRES ET ILLUSTRATION. THIS COLOR PRINT IS ONLY USED FOR THE TEXT, BARCODE AND PICTURE POSITIONNING.

Madame, Monsieur
Merci de nous envoyer 5 jeux de triptyques concernant cette référence
Dear Madam, dear sir,
Thanks to send us 5 sets of triptych concerning this item. Best regards.

LABORATOIRES URGO	
LABORATOIRES URGO - SERVICE PACKAGING BATIMENT 20 - 42 RUE DE LONGVIC - 21300 CHENOVE	
DÉSIGNATION DE L'ARTICLE :	DIMENSIONS :
PROSP URGOTUL FOAM-ALL RECTO	150 x 280 mm 50-45 Corps 07
IMPRESSION 1 COULEUR :	CODE ARTICLE :
● 540 U	419827 A
	DATE DE REALISATION :
	19/03/2014
	LAS 2
VISA CHEF PRODUIT :	DATE DE VALIDATION :
NOM : S. BODINI	20/03/2014
DATE : 03/2014	LAS