



Tytex A/S

Industrivej 21, 7430 Ikast, Dänemark

www.tytex.com

Kundenbetreuung:

E-mail: customerservice@tytex.com

International: +45 9660 4202

Nord- und Lateinamerika: 1-855-569-6131

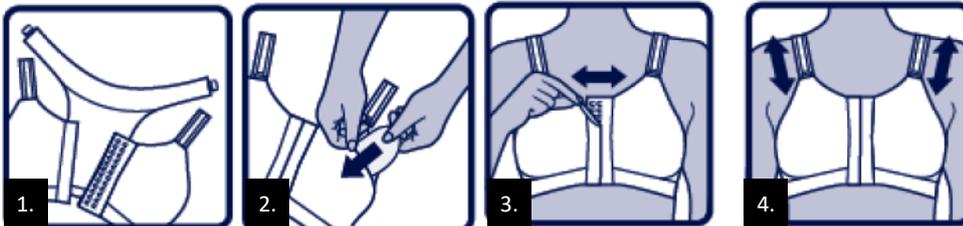
Hergestellt in der Slowakei

Indikationen:

Medizinisches Produkt für den Gebrauch nach chirurgischen Eingriffen wie Brustoperationen und insbesondere bei Mastektomie und Lumpektomie. Mit Taschen für Carefix-BH-Einlagen (Einlagen nicht inbegriffen).

Eigenschaften:

Bietet Stützung/Kompression, die durch die Wahl der Größe und durch die Haken- und Öse-Reihe reguliert werden kann. Schützt Wunden und Narben. Die breiten Träger und die hohe Rückenstütze entlasten Nacken, Schultern und Rücken. Der BH hat keine Nähte und ist angenehm zu tragen.

Gebrauchsanweisung:

1. Der BH kann vollständig sowohl bei der Brust als auch bei den Trägern geöffnet werden und erlaubt somit die mühelose Anwendung und Einstellung im Operationssaal und/oder während der Genesung.
2. Falls vorhanden, Carefix-BH-Einlage(n) in die dafür vorgesehene Tasche einstecken.
3. Der einstellbare Verschluss an der Vorderseite mit 2 Reihen mit 8 Haken und Ösen ermöglicht die bequeme Kontrolle der Wunde und bietet Einstellmöglichkeiten für Stützung/Kompression.
4. Passen Sie die Träger an, sodass der BH nicht die Haut reizt, sondern eine optimale Stütze unter den Brüsten und Achseln und ein angenehmes Tragegefühl bietet.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Fragen bezüglich des Gebrauchs und dem korrekten Anbringen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Bandagen und/oder Drainageleitungen unterhalb des BHs korrekt angebracht sind, um Druckstellen und/oder Behinderungen des Flusses der Drainageleitungen vorzubeugen. Bei Brustvergrößerungen kann ein Stabilisierungsband für Brustimplantate ebenso erforderlich sein. Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt oder Chirurg. Folgen Sie immer den Empfehlungen des Chirurgen. Der BH muss vor Beginn einer Strahlentherapie abgelegt werden, da er Metallteile enthält. Bei unerwarteten Beschwerden oder Wundirritationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an Ihr Pflegepersonal.

Gebrauchsanweisung – Post-Mastektomie BH, Mary

Material:

91 % Polyamid, 9 % Elasthan

3XL-4XL

94% Polyamid, 6% Elasthan

Pflege:

104°F

Haken und Ösen vor dem Waschen verschließen. Mit ähnlichen Farben und in einem Wäschenetz waschen. Der Gebrauch von chlorbasierter Bleiche bzw. chlorbasierten Desinfektionsmitteln wird Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für die künftige Verwendung gut auf