

Gebrauchsanweisung HYTO MED



HYTO GmbH

Hochfeld 242

A - 5721 Piesendorf

Tel.: +43 660 23 70 221

Mail.: info@hyto.at



Inhalt

Allgemeine Informationen.....	3
Vorbemerkungen	3
Zweckbestimmung	3
Indikation	3
Konformitätserklärung	4
Haftung	4
Sicherheitshinweise	4
Wartungshinweise.....	4
Produkt und Lieferinformationen	5
Prüfung der Lieferung.....	5
Kennzeichnung und Typenschilder	6
Voraussetzung für Montage	6
Montageschritte	7
Montagevideo.....	8
HYTO System	8
Typenschild.....	8
Pflegehinweise.....	9
Technische Daten	9
Materialhinweis	9
Kundenrückmeldung	11

Allgemeine Informationen

Vorbemerkungen

Vielen Dank, dass Sie sich für den HYTO MED entschieden haben.

Unser HYTO MED kann schnell und einfach an nahezu jeder gängigen WC – Keramik montiert werden und bietet dabei eine Erhöhung der Sitzposition von etwa 12cm.

Das HYTO Systemscharnier bietet stabilen Halt und ist dennoch leicht zu reinigen. Die Sitzbrille kann für die Unterhaltsreinigung einfach hochgeklappt und für eine Grundreinigung schnell abgenommen werden. Die ergonomisch geformte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Diese beinhaltet wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Montage und Pflege der Sitzerhöhung. Gerne können Sie sich mit weiteren Fragen oder Anregungen an unsere Serviceabteilung oder den zuständigen Fachhändler ihres Vertrauens wenden.

Zweckbestimmung

HYTO MED ist für die Toilettenbenutzung von Personen mit bis zu 140kg geeignet. Für die Benutzung als Sitzgelegenheit ist die Sitzerhöhung ungeeignet.

Indikation

Die Versorgung mit Toilettenhilfen ist angezeigt bei Personen mit

- Fehlender Rumpfkontrolle
- Hüft- und Wirbelsäulenversteifte
- Bewegungseinschränkungen durch Hüftprothesen
- Eingeschränkte Beweglichkeit bzw. Muskelkraft

Konformitätserklärung

Für den Toilettensitz HYTO MED erklärt die HYTO GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte. Die dieser Erklärung zugrundeliegenden Prüfungen und Gutachten können gerne durch ihren Fachhändler angefordert und erläutert werden.

Haftung

Die HYTO GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Fremdeinwirkung und nicht sachgemäßer Handhabung entstehen, haftet die HYTO GmbH nicht. Sollten Sie selbst nicht in der Lage sein das HYTO Systemscharnier ordnungsgemäß zu montieren, wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler.

Sicherheitshinweise

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung der Toilettensitzerhöhung keine Gefahr aus.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 140 kg. Achten Sie auf festen Sitz des Scharniers und ordnungsgemäßem Einrasten des Halteklipp.

Stellen Sie sicher, dass die WC-Keramik korrekt montiert ist, ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate.

Wartungshinweise

Die Toilettensitzerhöhung ist wartungsfrei. Bei jeder Grundreinigung sollte eine augenscheinliche Prüfung der Toilettensitzerhöhung durchgeführt werden. Da Kunststoff einer natürlichen Alterung unterliegt, sollte jährlich eine genaue Inspektion auf Risse oder Beschädigungen stattfinden und nach 6 Jahren sollte die Toilettensitzerhöhung erneuert werden.

Produkt und Lieferinformationen

Prüfung der Lieferung

Die Toilettensitzerhöhung ist komplett in einem Karton verpackt.

Bitte prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

- 1 Umverpackung
- 1 Toilettensitzerhöhung vormontiert *
- 1 Halteklipp
- 1 HYTO Systemscharnier in extra PE Beutel **
- 1 Gebrauchsanweisung



* vormontiert mit 4x Auflagepuffer und Typenschild


** HYTO Systemscharnier nicht enthalten bei HYTO MED Modular

Kennzeichnung und Typenschilder


Typen- und Herstellerschild ist an der hinteren Innenwand angebracht und ist bei Hochklappen des Sitzes sichtbar. Bitte achten Sie auf Lesbarkeit und Verbleib des Typenschildes am Sitz. Dieses ist für die Identifizierung des Produktes notwendig und darf nicht entfernt werden.

Voraussetzung für Montage

Die Toilettensitzerhöhung kann auf jede übliche WC Keramik montiert werden.

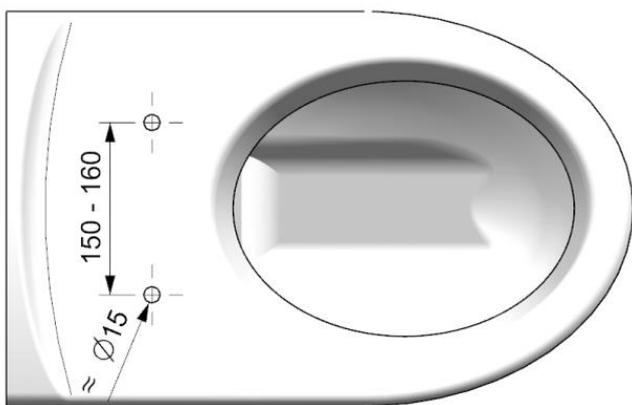


Durchgängige Befestigungsbohrung

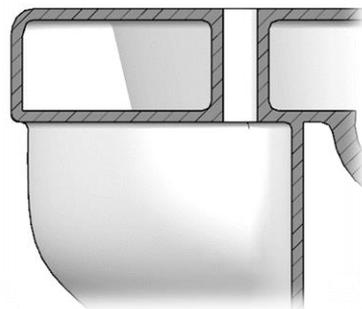


Bei neueren WC-Keramiken kann „Montage von Oben“ notwendig sein. Bitte fragen Sie bei Ihren Fachhändler nach dem „*HYTO TOP Mounting*“ Scharnier!

Der Abstand der Montagebohrungen der WC Keramik zur rückseitigen Wand sollte mindestens 10 cm betragen, damit der Sitz für die leichte Unterhaltsreinigung hochgeklappt werden kann.

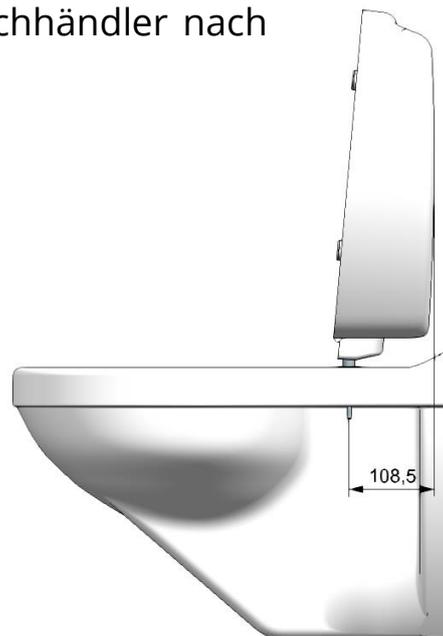

Montageschritte



Schrauben Sie gegebenenfalls ihren vorhandenen WC Sitz von der Keramik und setzen das HYTO System Scharnier auf. Auflagescheibe und Dichtscheibe werden von oben aufgesetzt.

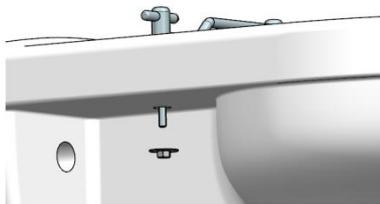


M6 (2x)

Setzen Sie die Unterlegescheibe und Mutter unten an und ziehen Sie die Mutter leicht an.

Schieben Sie die HYTO Sitzerrhöhung seitlich auf. Richten Sie die Position der Sitzerrhöhung zur Keramik und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit beigelegtem Werkzeug fest an.

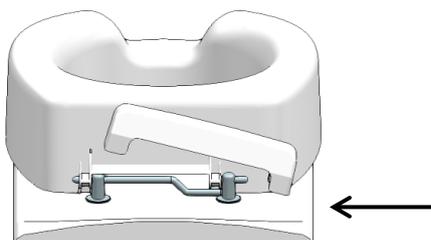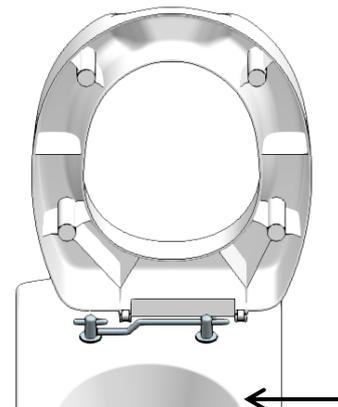

Setzen Sie den Halteklipp seitlich an und schieben diesen auf die Scharnierstange auf. Klappen Sie nun den Halteklipp auf das Scharnier auf bis Sie ein Schnappgeräusch vernehmen.

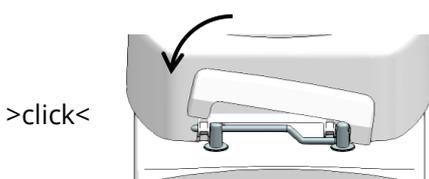

Die HYTO Sitzerrhöhung ist fertig montiert!

Für die Abnahme zur Reinigung den Halteklipp in umgekehrter Reihenfolge aufklappen und seitlich abstreifen. Die HYTO Sitzerrhöhung kann seitlich abgeschoben werden.

Montagevideo

Für ein ausführliches Montagevideo besuchen Sie gerne unsere Homepage >www.hyto.at< oder scannen Sie diesen QR-Code, um zu dem angeführten YouTube Link zu gelangen.



<https://www.youtube.com/watch?v=fbyTILclFyc>

HYTO System

Mit dem HYTO Systemscharnier kann leicht zwischen der Sitzerrhöhung und einem gewöhnlichen WC Sitz gewechselt werden. Bitte fragen Sie ihren Fachhändler nach dem HYTO Modular System oder besuchen Sie unsere Homepage >www.hyto.at< für weitere Informationen.

Typenschild

HYTO MED

Ein Produkt der
HYTO GmbH
Hochfeld 242
A-5721 Piesendorf
www.hyto.at



max. Belastbarkeit: 140kg

Pflegehinweise

Die HYTO Sitzerrhöhung ist gegen alle gängigen chemischen Reiniger resistent. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Schleifzusatz oder Microfaser-Tücher, um die Oberfläche nicht zu zerstören.

Zur Unterhaltsreinigung normale Seifenlauge oder milde, natürliche Spülmittel verwenden, mit Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Keine scheuernden Mittel oder kratzende Reinigungsschwämme einsetzen.

Zur Grundreinigung wird die HYTO Sitzerrhöhung abgenommen und kann sicher in industriellen Spülern bis 60° gereinigt werden. Nach Montage muss die Sitzerrhöhung auf korrekten Sitz geprüft werden.

Die WC-Sitz Befestigungsteile (Scharniere) sind aus rostfreiem Edelstahl. Diese sollten dennoch von WC-Keramik-Reinigungsmittel befreit werden, bzw. müssen nach Kontakt mit reinem Wasser nachgereinigt werden, um Schadstellen an den Oberflächen zu vermeiden!

Technische Daten

GTIN Nummer	9120087750108
Sitzflächenbreite [cm]	37,5
Sitzflächentiefe [cm]	41
Erhöhung der Sitzposition [cm]	ca. 12
Öffnung L x B [cm]	28 x 23
Maximale Belastbarkeit [kg]	140

Materialhinweis

Die HYTO Sitzerrhöhung und der Halteklipp sind aus dem Material PP + 20% Talkum gefertigt. Das Material ist auf seine Unbedenklichkeit durch TÜV Rheinland geprüft worden. Gerne können Sie das Prüfzeugnis durch Ihren Fachhändler anfordern oder gehen Sie direkt auf unsere Homepage www.hyto.at

Garantiehinweis

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.

Garantie – Abschnitt

Produkt:

Modellbezeichnung

Seriennummer

Fachhändler:

Datum und Stempel

Senden an:

HYTO GmbH
Hochfeld 242
A-5721 Piesendorf
AUSTRIA

