

ME MEDICAL

DE - ME Medical™ Professionelles Rasiergerät

FR - ME Medical™ Tondeuse Professionnelle

IT - ME Medical™ Rasoio professionale


EN- ME Medical™ Professional Clipper

PT - ME Medical™ Tricotomizador Profissional

ES- ME Medical™ Recortadora de vello quirúrgica profesional

TR-ME Medical™ Bu Talimantlari Saklayin

MODEL:SC001

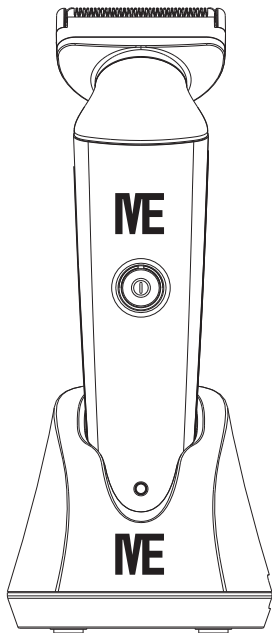

BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**Wichtige Sicherheitshinweise**

Beim Einsatz dieses Rasiergerätes immer die allgemein gültigen Vorsichtsmassnahmen ergreifen.

Vor dem Einsatz sind alle Sicherheitsinformationen sorgfältig zu lesen und zu verstehen.

VERWENDUNGSZWECK

- Das ME Medical Rasiergerät ist ein schnurloses, aufladbares, batteriegetriebenes Rasiergerät, das aus einem Handgriff, einer Ladestation und einer Einweg-Scherkopfeinheit besteht.
- Das ME Medical Professionelle Rasiergerät wird zur Entfernung von Körperbehaarung genutzt.
- Dieses Produkt wird anstelle der üblichen Rasierklinge verwendet, um Verletzungen zu minimieren, die durch herkömmliches Rasieren hervorgerufen werden können.
- Bei richtiger Anwendung entfernt das Professionelle Rasiergerät von ME Medical die Haare schnell und gründlich; es ist ein leistungsstarkes und schonendes Gerät zum Entfernen von dickem wie feinem Haar. Es funktioniert optimal bei jedem Haar Typ, nass oder trocken, sogar bei empfindlichen Bereichen.
- Das Rasiergerät wurde ausschliesslich zur Verwendung mit dem Einwegscherkopf des Professionellen Rasiergeräts von ME Medical entworfen und getestet.

WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Gefahren durch Feuer und Explosionen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod bzw. Sachschäden führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Das Rasiergerät nicht in einer Umgebung betreiben, in der Aerosol-/Sprüh-Produkte, Geräte für die Zufuhr brennbarer Narkosegemische mit Luft, Lachgas oder Sauerstoff, ausser nasalen Produkten oder Masken, verwendet werden.
- Rasiergerät nicht bei Personen verwenden, deren Kleidung mit brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. Benzin, Heizöl, Lösungsmitteln o.a. getränkt ist.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammbarem Alkohol oder ähnlichen Reinigungslösungen verwenden. Bei Reinigung des Rasiergerätes mit Alkohol sicherstellen, dass das Rasiergerät und die Umgebung gut gelüftet wurden und Dämpfe entweichen konnten, bevor das Kabel des Ladegerätes angeschlossen bzw. das Rasiergerät eingeschaltet wird.

Zur Vermeidung von Risiken durch gefährliche Stromspannung, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Die Ladestation nie mit nassen Händen an der Steckdose anschliessen bzw. den Stecker herausziehen.
- Vor der Reinigung der Ladestation immer den Stecker herausziehen.
- Die Ladestation nicht dort aufstellen oder lagern, von wo aus sie in eine Badewanne oder in ein Spülbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Eine ins Wasser oder in eine andere Lösung gefallene Ladestation nie herausholen. Sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Rasiergerät nie aufladen, wenn die Ladestation ein beschädigtes Kabel oder einen defekten Stecker aufweist, wenn sie heruntergefallen ist und beschädigt wurde oder wenn sie uns Wasser gefallen ist.
- Akku nicht ins Feuer werfen oder bei der Entsorgung zerstören, das es zu einer Explosion kommen kann oder toxische Materialien austreten können.
- Die Kontakte des Akkus nicht mit einem metallenen oder leitenden Gegenstand überbrücken und so die Akkus im Rasiergerät kurzschliessen, das dies Verbrennungen verursachen könnte.
- Die Akkus des Rasiergerätes dürfen nicht ausgetauscht werden. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

Zur Vermeidung von Risiken durch Kreuzkontaminationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Scherkopfeinheit nicht wiederverwenden. Nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.
- Stets vor der Verwendung den Griff des Rasiergerätes reinigen.

VORSICHT:

Zur Vermeidung von Gefahren durch Feuer und gefährliche Stromspannung, die zu leichten oder mässig schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Gehäuse des Rasiergerätes, Ladestation oder Scherkopfeinheit nicht sterilisieren.
- Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
- Das Rasiergerät und die Ladestation immer an einem trockenen Ort, ohne Feuchtigkeit, aufbewahren.
- Nicht versuchen, den Akku im Rasiergerät auszuwechseln.
- An den Bauteilen im Inneren des Gerätes keine Änderungen vornehmen. In diesem Gerät wurden keine Bauteile verwendet, die vom Nutzer repariert werden können.
- Das Rasiergerät nicht im Freien lagern.
- Das Kabel der Ladestation von heissen Oberflächen fernhalten.
- Die für die Ladestation geeignete Netzspannung wird auf dem Typenschild aufgeführt.
- Dieses Gerät kann elektromagnetischen Störungen (EMI) verursachen. Falls dies festgestellt wird, das Produkt von dem beeinträchtigten Gerät fernhalten.

Zur Vermeidung von Gefahren durch Umweltbelastungen, die zu leichten bzw. mässig schweren Verletzungen führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Bei Entsorgung gebrauchter Geräte sind die geltenden Vorschriften einzuhalten.
- Die Akkus entsprechend den örtlichen, bundesstaatlichen und/oder staatlichen Anforderungen entsorgen.
- An den Bauteilen im Inneren des Gerätes keine Änderungen vornehmen. In diesem Gerät wurden keine Bauteile verwendet, die vom Nutzer repariert werden können.

Zur Vermeidung von Gefahren durch Hauteinschnitte und Lazerationen, die zu leichten bzw. mässig schweren Verletzungen führen können, ist Folgendes zu beachten:

- Rasiergerät nicht verwenden, wenn die Scherkopfseinheit beschädigt oder zerbrochen ist.
- Beim Rasieren nicht über eine Hautstelle kratzen, denn diese Methode könnte die Haut beschädigen.
- Die Temperatur des Scherkopfes kann bei längerer Anwendung bis zu 50°C erreichen.

VERANTWORTUNG DES ERWERBERS

Die Verantwortung für den Einsatz des Gerät liegt beim Anwender.

Erklärung der Symbole

Vorsicht – siehe Gebrauchsanweisung

Nicht wiederverwenden.

Lagerung

Lagerungs- und Beförderungsbedingungen: -20°C bis +50°C; 10% bis 100% RF, 50 bis 106 kPa

Betriebsbedingungen: +0°C bis +40°C; 30% bis 75% RF, 70 bis 106 kPa

BETRIEBSANLEITUNG

Beim Befestigen des Einweg-Scherkopfes am Rasiergerät Folgendes beachten:

Sicherstellen, dass sich der Schalter ON/OFF (EIN/AUS) in der Position OFF befindet. Nach dem Öffnen der Verpackung des Scherkopfs Rasiergerät über den Scherkopf halten, ohne den Scherkopf zu berühren. Den neuen Scherkopf einschieben bis er einrastet.

Gebraucht des Rasiergerätes:

Die LED-Anzeige leuchtet grün. Wenn die Anzeige rot blinkt, ist ein Aufladen notwendig.

Das Rasiergerät mit dem Scherkopf in horizontaler Lage bis zu einem leichten Winkel halten und mit gleichmässigen Bewegungen über die Haut führen. Die besten Resultate werden bei der Rasur gegen die Wuchsrichtung der Haare erzielt. An unebenen Stellen die Haut beim Rasieren straffen. Der Scherkopf lässt sich zur Erreichung von schwierigen Körperarealen 45° nach links und rechts drehen und durch einrasten. Das Rasiergerät kann auf verschiedene Arten gehalten werden. Es kann die angenehmste Methode gewählt werden, die es erlaubt, den Scherkopf in

horizontaler Lage bis zu einem leichten Winkel zur Haut halten. Das Gerät kann über die Haut gezogen und geschoben werden. Niemals mit dem Rasiergerät über die Haut kratzen.

Austauschen des Einweg-Scherkopfes:

Den Schalter ON/OFF zur Position OFF drücken. Das Rasiergerät mit einer Hand halten. Das Rasiergerät mit dem Scherkopf nach unten über einen entsprechenden Abfallbehälter halten. Mit dem Daumen auf die Scherkopf-Entriegelungstaste drücken, um den Scherkopf vom Rasiergerät zu entfernen und wegzuworfen.

HINWEIS: Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, den Scherkopf nach einmaligem Gebrauch entfernen und ordnungsgemäss entsorgen.

Pflege und Reinigung des Rasiergerätes:

Das Gehäuse des Rasiergerätes ist wasserfest und besteht aus strapazierfähigem Kunststoff. Es kann mit einem feuchten Tuch mit einer kleinen Menge Alkohol, Desinfektionsmittel oder milder Reinigungslösung abgewischt werden. Es kann auch unter laufendem Wasser abgespült oder in eine hochkonzentrierten Desinfektionslösung eingetaucht werden. Stets die Herstelleranweisungen für die hochgradige Desinfektion (nach ANSI/AAMI ST58:2005 für chemische Sterilisation oder hochgradige Desinfektion in Gesundheitseinrichtungen) befolgen. Das Rasiergerät vor dem Einsetzen in die Ladestation bzw. dem erneuten Verwenden vollständig trocknen lassen.

Gehäuse des Rasiergerätes oder Scherkopfeinheit nicht sterilisieren.

Zum Aufladen des ME Medical Professionellen Rasiergerätes:

Zum Aufladen des Rasiergerätes:

1. Den Schalter ON/OFF in die Position OFF schieben.
2. Vor dem Einsetzen des Rasiergerätes in die Ladestation sicherstellen, dass die Kontakte des Rasiergerätes und die Ladestation sauber und frei von Haaren und Verschmutzungen sind.
3. Die Ladestation an eine geeignete Steckdose anschliessen und sicherstellen, dass das Kabel nicht verdreht oder geknickt ist.
4. Das Rasiergerät vor dem erstmaligen Gebrauch für 1 Std. an eine geeignete Steckdose anschliessen, um sicherzustellen, dass es vollständig aufgeladen ist.

WARNHINWEISE

- Akku nicht ins Feuer werfen oder bei der Entsorgung zerstören, da es zu einer Explosion kommen kann oder toxische Materialien austreten können.
- Die Kontakte des Akkus nicht mit einem metallenen oder leitenden Gegenstand überbrücken und so die Akkus im Rasiergerät kurzschliessen, da dies Verbrennungen verursachen könnte.
- Die Akkus des Rasiergerätes dürfen nicht ausgetauscht werden. Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

VORSICHT

- Die Akkus entsprechend den örtlichen, bundesstaatlichen und/oder staatlichen Anforderungen entsorgen.

- An den Bauteilen im Inneres des Gerätes keine Änderungen vornehmen. In diesem Gerät wurden keine Bauteile verwendet, die vom Nutzer repariert werden können.

KOMPONENTEN

Aufladbares Rasiergerät SC001 mit Ladestation mit Kabel

Einweg-Scherkopf des Rasiergerätes SC002

Die Einweg-Scherkopfeinheit des Rasiergerätes ist die einzige Klinge, die im ME Professionellen Rasiergerät SC001 verwendet werden darf.

TECHNISCHE DATEN DES RASIERGERÄTS SC001

Motorspannung: 3,7 Volt Gleichstrom

Strom ohne Last: 0,25A

Strom mit Vollast: 0,7A

Umdrehungen pro Minute: 6500

Netzadapter Ladeschaltungen: Alle Netzadapter/Ladeschaltungen verfügen über IN PUT:100-240~ 50/60Hz 0.3A OUT PUT:5.0Vdc 1.5A

Ladezeit: 1h

Betriebszeit mit Akku: 60 Minuten

Batterie: Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800mAh

Gewicht des Rasiergeräts (mit Scherkopf): 132g / (ohne Scherkopf) 122g

Abmessungen des Rasiergeräts (mit Scherkopf): 158x46,5x40,5mm

Garantien/ME Medical Haftpflicht

Beschränkte Garantie

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien wie folgt: die Garantiezeit des Rasiergerätes von ME Medical für Defekte in Material oder Verarbeitung beträgt 2 Jahre ab Erwerbsdatum. Wenn innerhalb der Garantiezeit festgestellt wird, dass dieses Rasiergerät Mängel aufweist wird es von ME Medical kostenfrei ersetzt. Von dieser Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch falsche Anwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Missbrauch, durch am Gerät vorgenommene Änderungen und Modifizierungen von anderen Personen als von ME Medical oder durch das Hinzufügen von Zubehör, das nicht von ME Medical hergestellt wurde, bzw. durch den Einsatz des Rasiergerätes bei einer Stromstärke oder Spannung, die nicht den in diesem Dokument angegebenen Werten entspricht, hervorgerufen wurden. Nach dem Ablauf der Garantiefrist werden dem Kunden alle Ersatzkosten in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Preise sind auf Wunsch erhältlich.

ME MEDICAL IST MIT AUSNAHME VON KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN WEDER FÜR VERLUST NOCH FÜR DIREKTE, MITTELBARE ODER NEBENSCHÄDEN, DIE DURCH VERWENDUNG, MISSBRAUCH ODER DURCH EINE UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES HERVORGERUFEN WURDEN, HAFTBAR. Alle stillschweigenden Garantieleistungen sind auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erstkaufs beschränkt.



Made in China for **ME Medical AG**, Toggenburgerstrasse 31, 9532 Rickenbach,
Switzerland

www.memedical.com

Issue Date: 2017-05