

# Welche Dauerflow-Einstellung entspricht welcher Pulseinstellung beim SimplyGo und SimplyGo Mini?

Einstellung Dauerflow (l/min)	Pulsstufe SimplyGo 	Pulsstufe SimplyGo Mini 
1,00	1 - 1,5	1 - 2
2,00	2,5	3
3,00	3,5 - 4	4
4,00	5	—
5,00	6	—
6,00	—	—

  

Pulsstufen	Volumen (ml) SimplyGo	Volumen (ml) SimplyGo Mini
1	12	11
1,5	18	—
2	24	22
2,5	30	—
3	36	33
3,5	42	—
4	48	44
4,5	54	—
5	60	50
5,5	66	—
6	72	—

## Beispielrechnung:

2 l/min Dauerflow bei 20 AZ/min = 1.200 AZ/Stunde

2 l/min \* 60 Minuten Abgabe = 120 l/Stunde – davon werden nur ca. 30 % während der Inspiration aufgenommen = 36 l/Stunde ÷ 1.200 AZ/Stunde = 0,03 l = 30 ml/AZ

**Hinweis:** Diese Rechnung ist theoretisch und gilt nur als Empfehlung. Die Übersicht ersetzt nicht die Titration des Patienten auf einen passenden portablen Sauerstoffkonzentrator – im Ruhezustand und unter Belastung (6-Minuten-Gehtest).

# Spezifikationen der **portablen Sauerstoffkonzentratoren**



	<b>SimplyGo</b>	<b>SimplyGo Mini</b>
<b>Gewicht</b>	4,5 kg mit Akku	2,3 kg (Standardakku) 2,7 kg (erweiterter Akku)
<b>Sauerstoffkapazität</b>	2.000 ml/min	1.000 ml/min
<b>Einstellungen</b>	Pulseinstellungen 1 – 6 Dauerflow 0,5 – 2 l/min Nachtmodus Puls 1 – 6	Pulseinstellungen 1 – 5
<b>Sauerstoffkonzentration</b>	87 – 96 %	87 – 96 %
<b>Lautstärke</b>	43 dB(A)	< 40 dB(A)
<b>Triggersensitivität</b>	- 0,16 cm H <sub>2</sub> O (Puls) - 0,11 cm H <sub>2</sub> O (Nacht)	≤ - 0,2 cm H <sub>2</sub> O
<b>Batterielaufzeit</b> bei einer Atemfrequenz von 20 AZ/min und Stufe 2	Puls: 3,5 Stunden Dauerflow 2: 0,7 Stunden	4,5 Stunden (Standardakku) 9 Stunden (erweiterter Akku)
<b>Batterieladezeiten</b>	Max. 6 Stunden	Max. 4 Stunden (Standardakku) Max. 8 Stunden (erweiterter Akku)
<b>Stromverbrauch</b>	150 W während des Ladens	120 W während des Ladens

© 2017 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen und/oder den Vertrieb eines Produktes jederzeit ohne Vorankündigung oder daraus entstehende Verpflichtungen einzustellen und haftet nicht für Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.



Philips GmbH Respirationics  
Gewerbestraße 17  
82211 Herrsching

[www.philips.de/atemtherapie](http://www.philips.de/atemtherapie)