

# Pflegewanne MK Fantasy

Installationszeichnung 01



**Kuhn und Bieri AG**

Sägestrasse 75, 3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40  
Fax 031 970 01 71  
info@kuhnbieri.ch

[kuhnbieri.ch](http://kuhnbieri.ch)

## Bauseitige Anschlüsse

- 1 : KW ½" 4–6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 2 : WW ½" 4–6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 3 : Wandablauf DN50 (Aussendurchmesser 56)
- 4 : Elektroanschluss Normsteckdose Unterputz  
230V 50Hz  
Abgesichert B 10A Automat  
Fehlerstromschutzschalter 30 mA  
Potentialausgleich

Alle Massangaben in mm


**Sämtliche Leitungen oder Kabel müssen in der Wand versenkt sein. Keine abstehenden Leitungen!**

**Eine Absperrung der Warm- und Kaltwasserleitungen in den Räumlichkeiten ist dringend erforderlich!**

**Bei Nichteinhaltung der Masse ist eine fachgerechte Installation nicht möglich und die Unkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.**

**An der Montagefläche des Hubgestells dürfen keine Sockel- oder Hohlkehlfiesen sein!**

**Es dürfen keine Leitungen hinter dem Pult/Unterkonstruktion verlegt werden!**

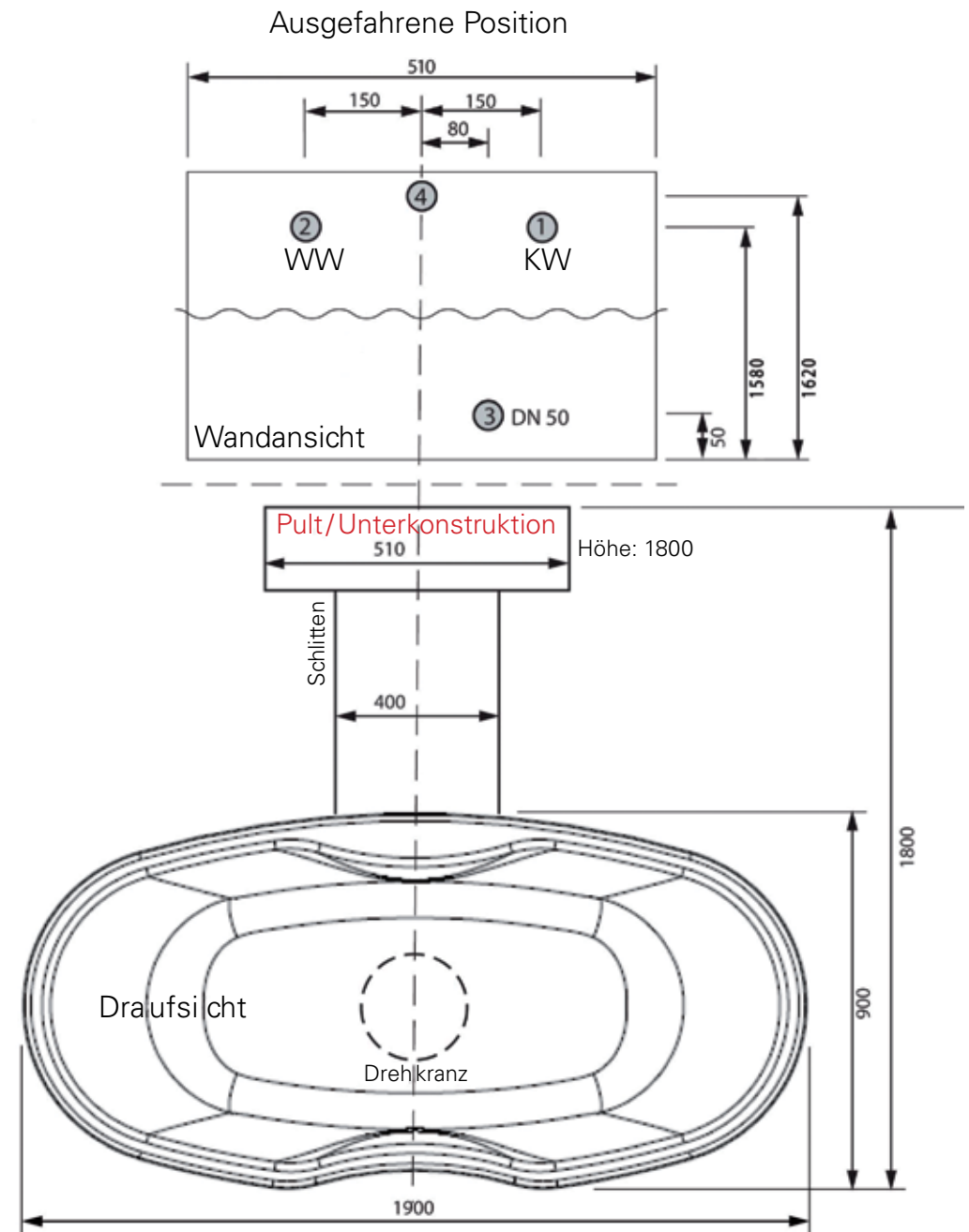

# Pflegewanne MK Fantasy

Installationszeichnung 02




**Kuhn und Bieri AG**


Sägestrasse 75, 3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40  
Fax 031 970 01 71  
info@kuhnbieri.ch

[kuhnbieri.ch](http://kuhnbieri.ch)

Ausgefahrene Position  
mit 90° Drehung

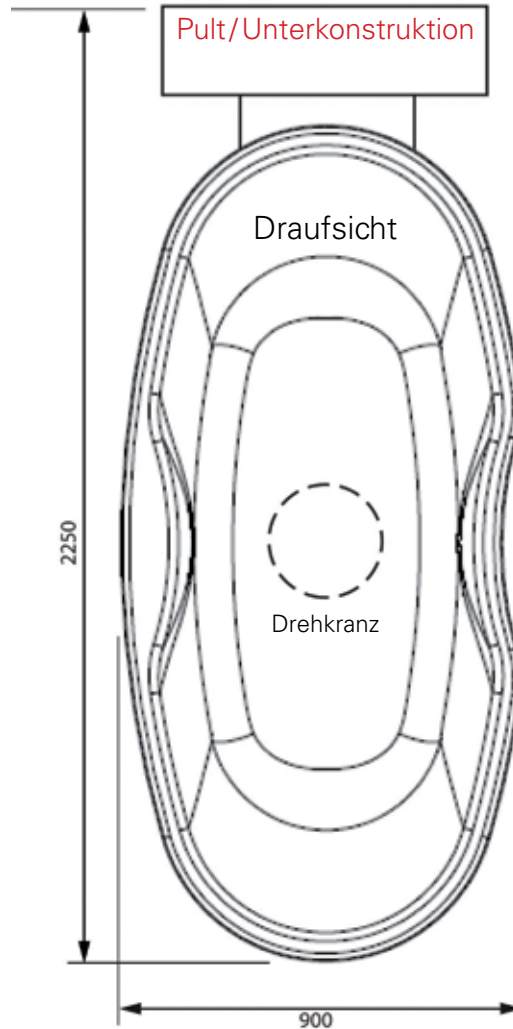

Eingefahrene Position

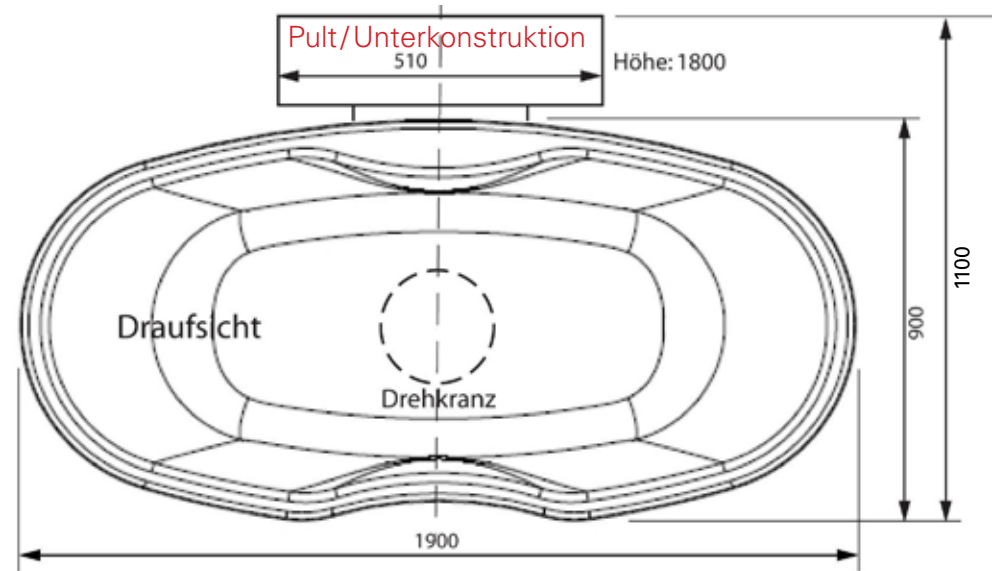

# Pflegewanne MK Fantasy

## Montagehinweise/Unterkonstruktion



### Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75, 3098 Köniz  
Telefon 0848 10 20 40  
Fax 031 970 01 71  
info@kuhnbieri.ch

[kuhnbieri.ch](http://kuhnbieri.ch)

**Beschaffenheit der Wände** Erfolgt die Montage nicht an einer Betonwand müssen nachfolgende Kriterien erfüllt sein. Ansonsten wird eine verstärkte Unterkonstruktion benötigt. Diese wird gemäss den Angaben des Herstellers durch unseren Spezialisten angefertigt und vormontiert.

**Gipswand** Ist eine Unterkonstruktion in jedem Fall notwendig. Gerne beraten wir sie.

**Backsteinmauerwerk** Das Mauerwerk muss eine Mindestdicke von 17,5cm aufweisen.

**Holzwand** Die Dicke der Holzwand muss mindestens 8cm betragen.

**Abwasseranschluss** Ein Anschluss ist nur an einem Wandabfluss möglich.

**Befestigungsbohrungen** Es dürfen sich keine Wasser- oder Stromleitungen hinter dem Rahmen (Bohrlöcher) in der Wand befinden. Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden!

Bohrungen **ROT** markiert.  
Alle Masse in mm.

- 1** KW ½" 4-6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 2** WW ½" 4-6 bar  
(Anschluss durch flexible Druckschläuche)
- 3** Wandablauf DN50 (Aussendurchmesser 56, kann rechts oder links positioniert werden)
- 4** Elektroanschluss Normsteckdose Unterputz  
230V 50 Hz  
Abgesichert B 10A Automat  
Fehlerstromschutzschalter 30 mA  
Potentialausgleich

